

	<p align="center"><b>ANA 2000 HCAA Dental Alloy prášek</b>  Zubní amalgám s vysokým obsahem mědi</p> <p align="center"><b>NÁVOD K POUŽITÍ</b></p>	<p><b>Výrobce:</b>  <b>Nordiska Dental AB</b></p>
--	---	---

Pilínové částice. Složení: Ag 43,1%Sn 30,8%Cu 26,1%



**CE 0510**

Poměr slitina/rtuť 1:1  
pro případ měkčího amalgámu 1:1,1  
v Dentomatu nebo Duomatu s originálními kapslemi

### **MÍCHÁNÍ**

1 ..... 30 vteřin

2-3 ..... 35 vteřin

Doba míchání se může měnit podle stáří a výkonnosti přístroje. Amalgamátoři s vysokými otáčkami jsou doporučeny

### **MANIPULACE**

Namíchaný amalgám podávejte po malých dávkách a kondenzujte. Přepněte kavitu a odstraňte vrstvičku rtuti. Ořežte do anatomického tvaru.

Doporučeno skladovat do 25°C. Jen pro dentální použití.

Nordiska Dental AB, Box 1082, S-262 21 Ängelholm, Sweden.