

	<b>ANA 2000 HCAA Dental Alloy</b> Zubní amalgám s vysokým obsahem mědi	<b>Výrobce:</b> Nordiska Dental AB
--	---	---------------------------------------



Pilinové částice. Složení: Ag 43,1%Sn 30,8%Cu 26,1%  
Nordiska Dental AB, Ängelholm, Sweden

## MÍCHÁNÍ

### PILINY

Produkt	1 dávka	30 sek.
ANA 2000	2-3 dávky	35 sek.

### KAPSLE

Produkt	Otáčky	Kapsle č.1	Kapsle č.2,3
ANA 2000	3500	10s.	12s.
	4000	8	10
	4500	7	9

### DUETT

CE 0510

Produkt	Otáčky	Duett 1 + 1	Duett 2 + 2
ANA 2000	3500	13	14
	4000	8	10
	4500	7	9

Tyto údaje jsou platné pro amalgamátoři Silamat S5, Ultramat 2 a ProMix.

Doporučeno skladovat do 25°C. Jen pro dentální použití.

Doba míchání se může měnit podle stáří a výkonosti přístroje. Amalgamátoři s vysokými otáčkami jsou doporučeny. K zabránění ztráty hmotnosti tablet v důsledku vibrací, skladujte výrobek na pevné podložce.  
Nordiska Dental AB, Box 1082, S-262 21 Ängelholm, Sweden.