

## **FLUORIDE GEL A.P.F. – Fluoridační gel**

### **OBECNÉ INFORMACE**

**FLUORIDE GEL A.P.F.** je lokální fluoridový roztok obsahující chemicky stabilní fluorid. Gel zůstane na svém místě, nedoje k jeho požití a i přesto zaručuje vynikající interproximální penetraci. Vysoké procento fluoridových ionů zajišťuje účinnou ochranu zubů před vznikem zubního kazu. Vhodný i pro nejmenší děti. Gel obsahuje 1.23% fluoridových ionů derivovaných z fluoridu sodíku.

### **NÁVOD K POUŽITÍ**

Před použitím jemně protřepejte. K vysokému uvolnění fluoridů dojde během 60-ti vteřin! pH výrobku je neutrální.

1. Proveďte důkladnou profylaxii. Naplňte obě dvě či jen jednu polovinu fluoridační lžice do 1/3. Vzduchem vysušte zuby a nasad'te lžičku do úst.
2. Nechejte pacienta zkousnout a jemně požívkat po dobu 1 minuty, aby došlo ke správné interproximální penetraci (4 minuty je optimální čas).
3. Vyjměte lžičky z úst. Pacient by po dobu 30-ti minut neměl pít a veškeré přebytky gelu je třeba vyplivnout!

### **UPOZORNĚNÍ**

Odstraňte z dosahu dětí. Pouze pro ordinační použití.

### **AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:**

**Hu-Fa Dental**, Moravni 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 27, fax: 577 926 205, e-mail: [hufa@hufa.cz](mailto:hufa@hufa.cz), [www.hufa.cz](http://www.hufa.cz)