

## **AUTOPACK**

### **Bezeugenolová periodentická pasta**

#### **Složení:**

Báze:	
Oxid zinku	22,00 g
Oxid magnezia	30,00 g
Enoxolon	1,00 g
Vláknité přísady q.s.ad	100,00 g
Katalyzátor:	
Colophane	40,50 g
Acetic Acid	1,00 g
Vláknité přísady q.s.ad	100,00 g

#### **Indikace:**

Gingivální pasta po bukálním zásahu nebo periodentické operaci.

#### **Použití:**

Bezeugenolová pasta, AUTOPACK je připraven k okamžitému použití, samopolymerující adhesivum. Díky bezugenolovému složení je bez problémů tolerován ústním prostředím a i po vytvrzení si ponechává elasticitu. Rovněž je akceptován pacienty díky tomu, že nemá žádnou chuť.

- Nasadte cartridge na aplikační pistol
- Sejměte ochranný uzávěr
- Nasadte míchací špičku
- Naneste potřebné množství pasty na míchací podložku (díky míchací špičce je směs katalyzátoru a báze promíchána)
- Nechejte směs 3 minuty v klidu
- Pracovní čas: 10 – 15 min
- Čas tuhnutí: 30 min
- Prsty si navlhčete roztokem Mercryl či podobným.
- Vytvarujte pastu dle potřeby a aplikujte na ošetřované místo použitím sekundárních retenčních ploch (interdentální mezery, krček zubu ...)
- Pastu lze ponechat na místě do příští návštěvy

#### **Upozornění:**

Nepoužívejte první centimetr pasty vytlačené z nové cartridge. Nikdy nesundávejte míchací špičku.

#### **Balení:**

2 dvojité cartridge (každá 60 g)  
15 míchacích špiček