

ACETO SCREEN KIT

Úvod

Aceto Screen je diagnostická pomůcka sloužící jako doplněk ke konvenčnímu ručnímu vyšetření orální mukózy. Tento doplněk velice často odhalí abnormální epiteliální změny v raném stádiu. Aceto Screen je určen pouze pro profesní použití zaškolenou osobou.

Pacient si nejdříve musí vypláchnout ústa 1% roztokem kyseliny octové (Aceto Screen), který dočasně dehydratuje cytoplazma buněk mukózy. Na hlavici DioPower nasadíte hlavici DioLight a do otvoru špičky zasunete jednorázový speciální světlovod. V menu přístroje vyberte difuzní světlo, aktivujte jednotku a zkontrolujte orální kavitu. Abnormální buňky mají bílou barvu, což je způsobeno zvýšeným poměrem buněčného nukleus/cytoplazma. Tyto změny se nazývají bílé léze. Aceto Screen je možno používat jako dodatečný diagnostický nástroj pro osoby starší 40 let a také u těch, které patří do rizikových skupin.

Potřebné vybavení a materiál

- DioPower lampa včetně DioLight diodová hlavice (bílé světlo) – postupujte dle instrukcí
- Speciální jednorázové akrylátové světlovody
- 1% roztok kyseliny octové – pro výplach úst

Instrukce

1. Běžným způsobem zkontrolujte následující místa: gingiva, bukalní mukózu, patro úst, tvrdé a měkké patro, dorzální, laterální a ventrální jazyk.
2. Nalejte 30ml Aceto Screen do kelímku a požádejte pacienta, aby si cca 1 min vyplachoval ústa a poté roztok vyplivnul. Nepolykat!
3. Oblasti zmínění v bodě č. 1 je poté třeba opětovně zkontrolovat pomocí DioLight hlavice při zeslabeném osvětlení místnosti. DioLight musí být nastaveno na difuzní bílé světlo. Během tohoto kroku hledejte v ústech pacienta bílé léze.
4. Jestliže naleznete v ústech pacienta bílé léze, je třeba jejich umístění zadokumentovat do pacientovy karty a doporučit jej pro návštěvu odborného lékaře na biopsii či histologii.
5. Negativní nález zcela nevylučuje možnost zhoubného bujení buněk.

Všeobecné informace

Aceto Screen Test je diagnostickou pomůckou sloužící jako doplněk ke konvenčnímu ručnímu vyšetření orální mukózy. Akrylátové světlovody jsou jednorázové. Aceto Screen roztok pro výplach úst obsahuje: vodu, kyselinu octovou, pomerančovou příchut', sodium benzoát E211. Skladujte při pokojové teplotě 25°C. Neskladujte v chladničce!

Aceto Screen roztok pro výplach úst je všeobecně neškodný, ale neměl by být polykán. Dojde-li ke kontaktu s očima, ihned je vypláchněte pod tekoucí vodou. Vyhledejte lékařské ošetření. Aceto Screen Test sestává z následujícího:

- 5 jednorázových akrylátových světlovodů
- lahvička obsahující 150ml 1% roztoku kyseliny octové pro výplach úst

Celý proces vyžaduje použití DioPower lampy a DioLight diodové hlavy (bílé světlo).