

ACROSEAL

Materiál pro výplň kořenových kanálků s guta perčovými čepy

Složení:

báze - glycyrrhetická kyselina (enoxelone), methenamin, radiopákní přísady
katalyzátor – kalcium hydroxid, DGEBA, radioopákní přísady

Vlastnosti:

Acroseal je cement založený na bázi kalcium hydroxidu. Skládá se ze dvou komponentů – pasty báze a katalyzátoru. Slouží pro permanentní výplň kořenových kanálků s guta perčovými čepy. Acroseal neobsahuje eugenol.

Indikace:

Materiál pro výplň kořenových kanálků s guta perčovými čepy

Kontraindikace:

Hypersensitivita na některou ze složek

Návod k použití:

Na míchací podložku vytlačte z tuby identicky stejné množství báze a katalyzátoru. Obě pasty míchejte tak dlouho dokud směs nebude homogenní. Pokryjte guta perčové čepy Acrosealem a kondenzujte čepy.

Upozornění:

Báze – poškozuje. Způsobuje citlivost při inhalaci a kontaktu s pokožkou.
Katalyzátor – korozivní, způsobuje popáleniny. Způsobuje citlivost při kontaktu s pokožkou.

Bezpečnostní doporučení:

Zabraňte kontaktu s pokožkou. V případě zasažení očí je okamžitě vypláchněte tekoucí vodou a vyhledejte lékařské ošetření. Při kontaktu s pokožkou omyjte mýdlem pod tekoucí vodou.

Poznámky:

- otevíráte-li tubu báze, eliminujte vrstvu kalové tekutiny
- čas tuhnutí Acrosealu, in vivo, je v rozsahu 16 – 24 hod a závisí také na hygrometrii
- míchací lžičky, podložky a všechny další použité nástroje je třeba ihned po použití očistit alkoholem nebo acetonem

Skladování:

Ukládejte na chladném místě (10 – 25oC). Tuby vždy pevně uzavírejte.

Balení:

Box obsahuje:

- 1 x 8.5g tuba báze
- 2 x 9.5g tuba katalyzátoru
- 1 x míchací podložka

Farmako-terapeutické zařazení:

Dentální produkt pro profesní použití

Výrobce:

Septodont, Francie