

Pouze pro použití ve stomatologii

## ADHESOR TC

### **Zinkoxid-eugenolový provizorní fixační cement**

#### **Výrobce:**

SpofaDental a.s., Markova 238, CZ-506 46 Jičín, www.spofadental.com

#### **Charakteristika:**

ADHESOR TC je provizorní fixační cement se zinkoxid-eugenolem určený k cementování provizorních náhrad, například korunek a můstků, a zkušebnímu cementování trvalých náhrad.

Výrobek má vynikající zatékavost, která zajistí snadné a správné nasazení náhrady. Dostatečně odolává tlakům vznikajícím při kousání, avšak v případě potřeby umožňuje náhradu snadno odstranit. Výrobek splňuje normu ISO 3107:2004, Typ I, Třída 1.

#### **Kontraindikace:**

Nepoužívejte v případě známé přecitlivělosti na některou ze složek přípravku (eugenol).

#### **Zpracování:**

Příprava a dávkování

Vytlačte na dodanou míchací podložku stejné množství pasty báze a katalyzátoru ADHESORU TC a míchejte je po dobu cca 30 sekund (doba míchání) plastovou nebo nerezovou špachtlí, dokud nevznikne homogenní směs. Konkrétní množství závisí na velikosti a typu cementované náhrady.

Doba zpracovatelnosti při teplotě  $23 \pm 2$  °C a za relativní vlhkosti  $50 \pm 10$  % je 2 minuty. Vyšší teplota i vlhkost vedou ke zkrácení doby zpracovatelnosti a tuhnutí. Doba tuhnutí je 7 minut.

#### **Aplikace:**

Osušte preparovaný zub a povrch náhrady. Aplikujte tenkou vrstvu namíchané směsi ADHESOR TC na všechny plochy. Náhradu pevně vsaďte do úst. Po ztuhnutí (cca 3 – 4 min. v prostředí ústní dutiny) odstraňte přebytečný cement. Přebytečný materiál mezi zuby lze snadno odstranit pečlivým vyčištěním mezizubní nítí, větší kusy odstraníme explorerem nebo jiným vhodným nástrojem. Světle žlutá barva ztuhlého materiálu umožní snadné odlišení od zubu.

#### **Skladování:**

Skladujte při teplotě od 5°C do 25°C, v dobře uzavřeném obalu.

#### **Nežádoucí účinky a varování:**

Eugenol obsažený v přípravku má negativní vliv na proces tuhnutí kompozitních materiálů a kompomerů.

Materiál ukládejte mimo dosah dětí.

#### **Doba použitelnosti:**

Datum použitelnosti se uvádí na vnějším obalu. Po tomto datu výrobek nelze používat.

#### **Balení:**

85 g pasty báze  
25 g pasty katalyzátoru  
1 míchací podložka  
1 návod k použití.

Značka CE 0044 se tiskne na horní stranu pokynů.