

## VŠEOBECNÉ INFORMACE

AQUA-PREP F, vodní roztok fluoridu a hydroxyethyl metakrylátu (HEMA), je zvlhčujícím agentem, který se používá před aplikací hydrofilické adhezivní pryskyřice, např. ALL-BOND 2 či ONE-STEP. AQUA-PREP F zodpovídá často kladené otázky typu „Jak vlhké je správně vlhké?“. Aplikace AQUA-PREP F zajišťuje ideální množství vlhkosti pro budoucí agenty. Klinické studie navíc dokazují, že AQUA-PREP F zajišťuje zamezení rozšíření kavity do okolních zubů.

AQUA-PREP F se aplikuje na kavitu po leptání a jemném vysušení, aby byla zajištěna správná úroveň vlhkosti, která zůstane v místě zásahu.. AQUA-PREP F napomáhá snižovat postoperační citlivost vzniklou díky přílišnému vysušení nebo nesprávného navlhčení dentinu.

## NÁVOD K POUŽITÍ

1. Leptejte dentin a sklovinu po dobu 15-ti vteřin pomocí 32% kyseliny fosforečné, např. UNI-ETCH s BAC. Poté omývejte 5 vteřin.
2. Vysušte vzduchem 2-3 vteřiny. Suchý, ale ne desikovaný povrch je ideální pro aplikaci AQUA-PREP F. Dentin by měl mít matný povrch a naleptaná sklovina mléčná.
3. Naneste 2 kapky AQUA-PREP F do míchací nádoby. Aplikujte pomocí štětečku na dentin a sklovinu. Nepoužívejte peletku.
4. Nechejte AQUA PREP F působit 20 vteřin.
5. Jemně osušte vzduchem, aby byl odstraněny přebytky. Zabraňte jejich hromadění, zvláště v interních záhybech kavity. Výsledný povrch by měl mít lesklý vzhled.
6. Aplikujte adhezivní pryskyřičný systém jako je ALL-BOND 2 nebo ONE-STEP dle instrukcí výrobce.

## SKLADOVÁNÍ

Materiál skladujte při pokojové teplotě 22°C. Expirace jednotlivých materiálů je vyznačena na krabičkách.

## BALENÍ

1 lahvička (6 ml) AQUA-PREP F  
1 lahvička (30 ml) AQUA-PREP F

B-2822P  
B-2822P

## UPOZORNĚNÍ

Nezpracovaný rezin může u některých osob způsobit podráždění pokožky. V případě kontaktu s pokožkou ji omyjte vodou a mýdlem. Nemířte lampou na tkáň!

## ZÁRUKA

Společnost Bisco se zaručuje vyměnit poškozené produkty. Společnost Bisco nepřijímá odpovědnost za poškození či škody způsobené použitím produktu jinak, než je uvedeno v návodu. Před prvním použitím je důležité si podrobně přečíst návod. V případě nejasností kontaktujte dodavatele.

## AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:

Hu-Fa Dental, Moravni 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 27, fax: 577 926 205, e-mail: [hufa@hufa.cz](mailto:hufa@hufa.cz), [www.hufa.cz](http://www.hufa.cz)