

**BioSonic**  
**Koncentrovaný čisticí prostředek**

**NÁVOD K POUŽITÍ:**

- Před použitím sejměte vnitřní víčko. Poté opět jemně zašroubujte vnější víčko. Nádobu jemně stiskněte dokud roztok nenaplní odměrku na hrdle.
  
- Doporučená koncentrace: 16 ml/litr



**UPOZORNĚNÍ/BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ**

- Při zasažení kůže - omyjte pod tekoucí vodou.
- Při zasažení očí – proplachujte tekoucí vodou po dobu 15 minut. Postiženého dopravte k lékaři.
- Při požití – nevyvolávejte zvracení. Vypijte 2 – 3 sklenice mléka nebo vody. Postiženého dopravte k lékaři.
- Potřísněný povrch opláchněte čistou vodou.
- Přípravek není určen pro vnitřní použití.
- Zabraňte smíchání s jakoukoliv jinou chemikálií.
- Skladujte nad bodem mrazu. V případě, že Vám produkt zmrzne, nechejte jej rozmraznout při pokojové teplotě a důkladně protřepte.