

## MÁTE SKUTEČNÝ ZÁJEM O OCHRANU SKLOVINY VAŠICH PACIENTŮ ?

# BisCover

**Nový, sklovinu pečecí materiál odolný abrazi zubním kartáčkem s fenomenálními výhodami pro pacienty:**

- 100% polymerace – žádná kyslíkem inhibovaná vrstva, jen hladký tvrdý povrch, který zajistí 0 mikropáry, je extrémně hydrofóbní a zajistí čištění od cementu snadněji a rychleji.
- Vysoce naplněný – vydrží abrazi zubním kartáčkem a slinami pro maximální ochranu
- Obsahuje fluorescenční směs pro snadné sledování oblasti aplikace
- Jedna tekutina – žádné míchání
- Světlem polymerující pro pohodlí a rychlost
- Univerzální aplikace – může být použit pod jakýkoliv světlem, chemicky nebo duálně tuhnutí kompozitní cement – bez rozdílu výrobce!

Nedělejte kompromisy se zdravím sklovin Vašich pacientů. Nyní máte ekonomický a jednoduchý ochranný sealant, který můžete použít společně s Vaším současným vazebným systémem.

## BISCOVER PRO ORTODONCII

### Světlem tuhnutí, fluorid uvolňující, naplněný ochranný lak

#### Vlastnosti výrobku

- **100% POLYMERACE:** BISCOVER je světlem polymerující leštící lak, jenž kompletně ztuhne bez oxidační vrstvy. Tímto vytvoří hladké a vytvrzené povrchy, které zabraňují vzniku mikropár, chrání sklovinu a usnadňují čištění od fixačního cementu.
- **VYSOCE NAPLNĚNÝ:** Odolává abrazi zubním kartáčkem
- **UVOLŇUJÍCÍ FLUORID**
- **POLYMERACE SVĚTLEM:** Žádné míchání
- **UNIVERZÁLNÍ APLIKACE:** BISCOVER lze použít pod jakýkoliv světlem, chemicky a duálně tuhnutí fixační kompozitní cement.

**BISCOVER** je třeba před použitím řádně protřepat, aby došlo ke správné konzistenci roztoku. **BISCOVER** (5 ml) postačí na cca 1.700 zubů. Tento údaj je čistě orientační vzhledem k množství aplikovanému na každý zub.

## NÁVOD K POUŽITÍ

#### PROFILAXIE:

Použijte rotační nástroj s gumovým kalíškem nebo kartáčkem a vyčistěte povrch sklovin pro bondování jemnou pemzou. Nepoužívejte profilační pastu obsahující olej. Tento olej může zanechat tenkou vrstvu narušující leptání. Zvláštní péči věnujte distálním zubům a lingálním povrchům, kde není dostatečná hygiena a může se zde ve velké míře vyskytovat zubní kámen. Poté zub omyjte a vysušte proudem vzduchu. Dbejte na to, aby vzduch neobsahoval olejové či vodní kapičky.

#### LEPTÁNÍ:

Na míchací podložku naneste leptadlo. Leptadlo může být tekutina i gel. Zub před leptáním izolujte. Bavlněným tamponkem naneste leptadlo na celou plochu, na kterou chcete bondovat. Leptadlo nechejte 30 vteřin působit. Zabraňte kontaktu leptadla s měkkými tkáněmi.

#### OPLÁCHNUTÍ A VYSUŠENÍ:

Povrch sklovin důkladně opláchněte proudem či sprejem vody. Tímto způsobem omyjte každý ošetřený zub. Omývejte 10 vteřin (20 vteřin pro gelové leptadlo), abyste zastavili leptací proces. Poté odstraňte demineralizované částičky. Během průběžného oplachování zubu nenechte pacienta vypláchnout si ústa! Zub opět izolujte a vysušte. Leptaná oblast by měla být ledově bílá. Jestliže tomu tak není, opětovně leptajte dalších 20 vteřin. Byla-li sklovina kontaminována slinami, má odhalený dentin nebo pokud je příliš fluorescenční, je třeba leptací krok také zopakovat.

#### APLIKACE KRYCÍ PRYSKYŘICE:

Na míchací podložku naneste kapku **BISCOVERu**. Kartáčkem naneste jednolitou tenkou vrstvu na naleptanou sklovinu. Přetřete opětovně kartáčkem, aby došlo k dokonalému pokrytí. Polymerujte v krátké vzdálenosti při vysokém výkonu (min. 600 mW<sup>2</sup>) po dobu 10-ti vteřin/zub či 15 vteřin při nižším výkonu. Nyní již můžete použít standardní chemicky či duálně tuhnutí kompozitní cement. Pro zachování typického povrchu zubu musí být **BISCOVER** nanesen na pečlivě vysušenou sklovinu. Atypické druhy

skloviny by se měli nejdříve ošetřit některým z kondicionérů.. Aby došlo ke správnému vytvrzení nanesené vrstvy BISCOVERu je třeba použít odpovídající výkon po předepsanou dobu a vzdálenost.

### **SKLADOVÁNÍ**

Materiál skladujte při pokojové teplotě 22°C. Expirace jednotlivých materiálů je vyznačena na krabičkách.



### **UPOZORNĚNÍ**

Nezpolymerovaná pryskyřice může u některých osob způsobit podráždění pokožky. V případě kontaktu s pokožkou ji omyjte vodou a mýdlem. Nemířte lampou na tkáň!

### **ZÁRUKA**

Společnost Bisco se zaručuje vyměnit poškozené produkty. Společnost Bisco nepřijímá odpovědnost za poškození či škody způsobené použitím produktu jinak, než je uvedeno v návodu. Před prvním použitím je důležité si podrobně přečíst návod. V případě nejasností kontaktujte dodavatele.

### **AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:**

**Hu-Fa Dental**, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 27, fax: 577 926 205, e-mail: [hufa@hufa.cz](mailto:hufa@hufa.cz), [www.hufa.cz](http://www.hufa.cz)