

BOND FAST NO MIX

ORTODONTICKÝ ADHEZIVNÍ BONDOVACÍ SYSTÉM

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava zubu

- Čištění
Dokonale vyčistěte bondovaný zub pemzou. Profy pastu obsahující olej nebo fluorid není možno použít, může zanechat zbytky, které mohou potlačit naleptání. Kompletně opláchněte zub množstvím vody. Vysušte bezolejovým/suchým zdrojem stlačeného vzduchu.
- Leptání
Aplikujte leptadlo na celou bondovanou oblast pomocí bavlněné peletky nebo štětečkem. Čerstvé leptadlo je možno aplikovat tupováním. Nenatírejte leptadlo na sklovinu. Leptání by mělo být dokončeno během 30ti vteřin. V případě mléčných zubů 120 vteřin. Dbejte na to, aby nedošlo k aplikaci leptadla na měkkou tkáň.
- Opláchnutí a sušení
Opláchněte dokonale vodou, abyste odstranili zbytky leptadla. Nenechejte pacienta vypláchnout nebo kontaminovat naleptaný povrch. Opět izolujte a kompletně vysušte bezolejovým/suchým zdrojem stlačeného vzduchu. Ošetřená oblast by měla být matná a sněhobílá. Jestliže ne, opět leptejte 20 vteřin.

Bondování

- Aplikujte tenkou vrstvu primeru na každý leptaný, suchý zub, na místo, kde budete bondovat breketu a pod každou bázi brekety. Malé množství pasty se aplikuje na bázi brekety.
- Umístěte na zub a během 30ti vteřin umístěte breketu do požadovaného umístění, pevně stlačte. Přebytečné adhezivum je možno snadno odstranit z okraje báze brekety po umístění na vybranou pozici. Po 5 – 10ti minutách lze vložit drát.

Snímání breket

Pro sejmutí brekety použijte speciální frézu k odstranění adheziva a toto odstraňte na sklovino-adhezivním kontaktu, následně separujte z povrchu zubu. Jakékoliv zbývající pečetidlo je možno odstranit ultrazvukem.

Upozornění a varování

- Nezpolymerovaný ortodontický bondovací materiál může způsobit podráždění. Po každém použití materiálu si řádně omyjte ruce. Pro zvýšení ochrany doporučujeme používat ochranné rukavice a oděv.
- Zabraňte kontaktu leptadla s měkkou tkání.
- Bondovací materiál je určen pro použití při pokojové teplotě.
- Expirace je dva roky.
- Expiraci prodloužíte skladováním v chladničce.
- Neskladujte materiál v blízkosti výrobků obsahujících eugenol.
- Nevystavujte materiál vysoké teplotě a zdrojům světla.
- Zabraňte kros-kontaminaci pasty a primeru. Přítomnost jednoho materiálu ve druhém zapříčiňuje tvrdnutí.
- Nikdy nepoužívejte dvakrát jednorázovou spatulu, je zdrojem kontaminace.
- Řádně materiál uzavírejte.
- Leptadlo obsahuje 37% kyselinu fosforečnou, která poškozuje pokožku a oči. V případě kontaktu zasažená místa opláchněte vodou. V případě zasažení očí vyhledejte ihned lékařské ošetření.

AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:

Hu-Fa Dental a.s., Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 27, fax: 577 926 205, e-mail: hufa@hufa.cz, www.hufa.cz