

VOCO CALCIMOL LC

Návod k použití

Calcimol LC je světlem polymerující radiopákní jednosložkový materiál na bázi kalcium-hydroxidu pro výplně a dočasné dlouhodobé pečetění. Může se aplikovat přímo a polymerovat halogenovou lampou. Díky své vysoké konzistenci je odolný proti resorpci a rozpouštění.

Aplikace:

Před aplikací pečlivě vysušte povrch a patřičně vydesinfikujte. Příprava koresponduje s pravidly přípravy běžné výplňové techniky.

V přímé blízkosti pulpy se doporučuje se aplikace nátěru kalcium hydroxidového přípravku (např. Calciur pro přímé kapničkování pulpy). Abyste zamezili marginálnímu prosakování a infiltraci bakterií v cervikálním/aproximálním okraji, doporučujeme permanentní izolaci (např. Solobond M/Admira Bond).

Naneste potřebné množství Calcimolu LC na míchací podložku a aplikujte vhodným nástrojem. V případě výplně více jak 1 mm aplikujte a polymerujte vrstvu po vrstvě.

Polymerujte Calcimol LC halogenovou lampou. Držte světlo co nejbližší k polymerovanému povrchu (cca 1 – 2 mm) a polymerujte nejméně 40 – 60 vteřin. V případě větší vzdálenosti prodlužte čas polymerace. Opatrně odstraňte přebytečný materiál pomocí rotačního nástroje a aplikujte výplň dle instrukcí výrobce.

Indikace, upozornění:

Calcimol LC je přílnavý k ostatním materiálům, např. korunkám a můstkům, dočasným pečetidlům, na metakrylátové bázi stejně jako některým otiskovacím materiálům (polyetherovým). Toto může vést k odstranění výplně. V těchto případech se doporučuje aplikace izolačního materiálu (např. Thermoline, vazelíny, glycerínového gelu apod.).

Složení Calcimolu LC nedovoluje odstranění přebytků sondou, tak by došlo pravděpodobně k odstranění celé výplně, proto používejte rotační nástroj.

Zamezte přímému kontaktu zpracovaného Calcimolu LC se světlem (lampa, slunce) a ihned aplikujte.

Calcimol LC obsahuje kalcium – hydroxide, TEDMA, BHT, UDMA a amin. Nepoužívejte materiál v případě pacientovy alergie. Eugenol a další složky (thymol) zabraňují polymeraci, proto zabraňte kontaktu s těmito materiály. Krátký polymerační čas a intenzita vedou k nedokonalé polymeraci, proto prosím pečlivě zkontrolujte lampu/halogenovou žárovku. Nanášíte-li materiál přímo stříkačkou, poté ji desinfikujte.

Balení:

Calcimol LC set 2 x 5 g

Calcimol LC set 2 x 2 ml stříkačky s interorálními špičkami

Jednorázové interorální špičky (100 ks)