

CIMPAT WHITE/PINK

Dočasné plnivo k okamžitému použití

Složení:

CIMPAT WHITE	
Oxid zinku	41,4 %
Sulfát zinku	12 %
Vláknité přísady q.s.ad	100 %
CIMPAT PINK	
Oxid zinku	42,28 %
Sulfát zinku	12 %
Vláknité přísady q.s.ad	100 %

Indikace:

Pasta pro dočasné výplně.

- Přílnavá k dentinu
- Rapidně tvrdne v kavitě
- Jemně se rozpíná během procesu tuhnutí
- Zaručuje hermetické uzavření

Cimpat Pink lze použít přes bavlněné ošetření či přímo na bázi kavity. Je taktéž vynikajícím výplňovým materiálem pře ošetření arzenem. Cimpat Pink lze použít k usazení dočasných korunek.

Cimpat White je více plastický než Cipat Pink. Obecně jej lze použít pro ošetření, které způsobuje tlakem bolest. Cimpat White lze odstranit sondou. Vzhledem ke své drolivé konzistenci by měl být Cimpat White používán pro krátkodobé dočasné výplně.

Upozornění:

Jako všechny výplňové materiály, Cimpat zůstává v aplikovaném místě pouze je-li kavita správně ošetřena. Cimpat je během tuhnutí změkčován roztoky (pasta nebo roztok) určenými k ošetření kanálků. Z toho důvodu je důležité, aby vždy před výplní kanálku Cimpatem byl patřičně očištěn a vysušen. Pro jednodušší aplikaci používejte zahřátou lžičku.

Balení:

Krabička obsahuje 6 lahviček po 25 g