

Core Build-Up Material

chemicky tuhnoucí

NÁVOD NA POUŽITÍ

Vytlačení pasty

- Vytlačte stejné množství báze a katalyzátoru na míchací podložku. Používejte správné konce špachtle, aby jste se vyhli kontaminaci pasty.

Smíchání pasty

- Rychle smíchejte pastu do uniformní směsi
- Toto by mělo trvat zhruba 30 sekund

Aplikace kompozita

- **Endodonticky ošetřené zuby.** Doporučujeme použít u tohoto výrobku prefabrikované čepy z důvodu retence a síly, přesto že to není podmínkou.
- **Vitální zuby.** Doporučujeme preparaci kavity do zakulacených retenčních oblastí.
- Doporučujeme použít calcium hydroxid pod materiál pokud dostavujete vitální zuby.
- Leptejte dle návodu sklovinných bondovacích systémů, použitím leptací techniky, při které jsou okraje dostavby na sklovině.
- Doporučujeme použít dentin-bondovací techniku na zvýšení retence a posílení vlastností materiálu.

Umístění

- Při pokojové teplotě má tento materiál **dobu míchání - 30 sek, pracovní čas - 2^{1/2} min. a čas tuhnutí 30-60 sek.**
- Použijte přebytečný materiál a vložte jej do preparované kavity pomocí matrice nebo bez, v závislosti na extenzitě restorace.
- Pokud budete ihned připravovat pro korunku nebo jinou náhradu, můžete použít kovový nástroj na aplikaci nebo použít matrici.

Upozornění

- Báze a katalyzátor obsahují Bis-GMa, složku, která může u některých lidí vyvolat alergickou reakci nebo iritaci pokožky. Vyhněte se kontaktu s pastami core-build-up. Pokud ke kontaktu dojde, okamžitě opláchněte teplou vodou a mýdlem.
- Neskladujte při teplotách přesahujících 22°C.

Dodává: **Hu-Fa Dental, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel: 067/792 62 26-9**