

CROMATIC - bezprašná alginátová otiskovací hmota s fázovým chromatickým indikátorem a vanilkovou příchutí.

CROMALGIN - bezprašná alginátová otiskovací hmota s fázovým chromatickým indikátorem a mentolovou příchutí.

Materiály jsou indikovány na všechny typy rutinních dentálních otisků, reprodukce čelistí, ortodontické aparáty, studijní modely apod.

NÁVOD NA POUŽITÍ

Před otevřením sáček důkladně protřepejte alespoň dvakrát, aby se jemný prášek, který má tendenci se usazovat během transportu a skladování, rovnoměrně rozprostřel. Toto Vám zajistí perfektní výsledek.

DÓZOVÁNÍ

Částečný otisk	1 zarovnaná odměrka (10 g) prášku + 1 odměrka (21 ml) vody
Otisk celé čelisti	2 zarovnané odměrky (20 g) prášku + 2 odměrky (42 ml) vody

Pro rozsáhlejší otisky je možno toto dózování proporcionálně zvýšit, avšak ve stejném poměru.

Důležité: Prášek nesmí být do odměrky napěchován, ale lehce nanesen a zarovnan míchací špachtlí.

Pokud požadujete řidší nebo hustší směs, použijte o trochu více nebo méně vody.

MÍCHÁNÍ (FIALOVÁ FÁZE) – 45 sek.

Smíchejte odměřené dávky v míchací misce s vodou při pokojové teplotě (23°C). Během míchací fáze změní materiál barvu z bílé na fialovou, což Vám umožní vizuální kontrolu doby míchání.

Upozornění: Rozdíly v teplotě vody mohou částečně ovlivnit doby míchání a tuhnutí: nižší teplota prodlouží dobu míchání/tuhnutí, zatímco vyšší teplota vody zkrátí dobu míchání/tuhnutí.

Výše uvedené pracovní časy jsou kalkulovány při použití destilované vody a tyto časy jsou podobné při použití běžné vody z kohoutku.

Přístrojové smíchávání:

Při míchání pomocí přístroje se doba míchání/tuhnutí částečně zkrátí. Pokud přístroj používáte, je nutné postupovat dle návodu výrobce přístroje o době míchání (cca. 9 sekund).

NAPLNĚNÍ OTISKOVACÍ LŽICE (RŮŽOVÁ FÁZE) – 45 sek.

Jakmile je míchání dokončeno, změní materiál barvu z fialové na růžovou. V tuto dobu by se měl materiál opatrně naplnit do lžice tak, aby nevznikly bubliny a materiál byl hladký a homogenní.

OTISKNUTÍ (BÍLÁ FÁZE) – 1 min.

Sdělte pacientovi, ať si vypláchne ústa teplou vodou. Poté co se stane směs bílou, vložte lžičku pacientovi do úst a upravte ji do správné pozice, se zvláštním důrazem na žvýkací síly v okrajích otisku. Je důležité zachovat jemný, ale rovnoměrný tlak na otisk během tuhnutí, které nastane během 1 minuty.

Upozornění: Protože materiál přiléhající na mukózní membránu dutiny ústní ztuhne o trochu dříve než materiál dotýkající se lžičky, je důležité zachovat jemný ale rovnoměrný tlak na otisk během celé doby tuhnutí. V opačném případě mohou vzniknout v materiálu tlaky a tahy, které po se po vyjmutí otisku uvolní, zdeformují otisk a způsobí nepřesnosti v modelu a při odlívání.

Po vyjmutí otisku z úst opláchněte veškeré sliny a jiné nečistoty pod proudem chladné vody.

ODLÍVÁNÍ:

Doporučujeme odlít otisk ihned po jeho zhotovení. Pokud to není možné, zabalte otisk do navlhčené utěrky a uskladněte v hermeticky uzavřeném polyethylenovém sáčku, aby se minimalizovali případné objemové změny.

Přestože si **Cromatic/Cromalgin** udrží své vlastnosti po delší dobu, doporučujeme odlít otisk do 48 hodin po jeho zhotovení.

SKLADOVÁNÍ:

Uchovávejte **Cromatic/Cromalgin** v suchém, chladném prostředí v hermeticky uzavřené nádobě.

V případě nějakých problémů s materiálem sdělte Vašemu dodavateli při reklamaci číslo šarže vyražené na každém sáčku materiálu.

Nepoužívejte materiál po jeho době expirace.