

# CURAY - MASK

**Světlem tuhnoucí set podbarvovacích barev, používaných jako maskovací vrstva na překrytí těžce zbarvených zubů pod konvenční a nátěrové kompozita.**

## NÁVOD NA POUŽITÍ

Zvolte si požadovaný odstín opákní pasty pomocí vzorníku uvedeného níže. Aplikujte tenkou vrstvu na naleptanou sklovinu a osvicujte halogenovou lampou po dobu 20 sekund. Ihned poté pokračujte s aplikací kompozita.

### OBSAH BALENÍ:

15g materiálu v 5 barvách

Odstín	Barva vzorník Bioform	Barva vzorník Vita
<b>Světlá</b>	<b>51,59</b>	<b>A1</b>
<b>Univerzál</b>	<b>65-67</b>	<b>A2, A3</b>
<b>Žlutá</b>	<b>54-56,68</b>	<b>B3</b>
<b>Šedá</b>	<b>92-95</b>	<b>C2, C3</b>
<b>Hnědá</b>	<b>82</b>	<b>A4</b>

### VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI MATERIÁLU:

- Vysoká maskovací schopnost na těžce zbarvené zuby.
- Široká barevná škála.
- Kompatibilní se všemi chemicky i světlem tuhnoucími konvenčními i nátěrovými kompozity.
- Vhodný světlem tuhnoucí systém umožňuje neomezený pracovní čas.
- Životnost materiálu je 2 roky při pokojové teplotě. Nepotřebuje uskladňovat v lednici.