

CALCIPULPE

KALCIUM HYDROXIDOVÁ PASTA

SLOŽENÍ

Calcium hydroxid	20,0 g
Barium Sulphate	20,1 g
Vláknité přísady	100 g

INDIKACE

Překrývání pulpy. Ochrana po pulpotomii. Výplňová hmota s ochranou dentinu a neutralizérem. Ošetření a znecitlivění korunek

VLASTNOSTI

Kalcium hydroxide v kontaktu či blízké přítomnosti negangrenózní pulpy, pomáhá formovat sekundární dentin. Chemicky neutralizuje kyseliny z úst a cementové hmoty na dně kavity a tím zabraňuje jejich dosažení pulpy. Calcipulpe neovlivňuje kvalitu výplně jestliže je nanášena v tenké vrstvě a vysušena vzduchem, aby byla urychlena její dehydratace.

NÁVOD K POUŽITÍ

NA DNĚ KAVITY

Aplikujte Calcipulpe v tenké vrstvě a vysušte pastu vzduchem, aby došlo k urychlení dehydratace. Odstraňte přebytečnou hmotu exkavátorem. Cementovou hmotu můžete nanést přímo na vrstvu Calcipulpu.

NA DNĚ HLUBOKÉ KAVITY

Vyčistěte stěny kavity a pomocí exkavátoru odstraňte co nejvíce změkklého dentinu, abyste maximálně rozšířili základnu kavity. Naneste tenkou vrstvu Calcipulpe na dno kavity a poté vysušte. Je-li třeba, zbytky odstraňte exkavátorem. Vyplňte.

NEPŘÍMÉ PŘEKRÝVÁNÍ

Standardním způsobem zkontrolujte, jestli je pulpa vitální. Pokračujte stejně jako v případě hluboké kavity. Poté vyplňte zinkoxidovým eugenolovým gelem bez komprese. Je-li třeba v kavitě nechat zbytky změkklého dentinu, pozvěte pacienta po 3 měsících a zkontrolujte, zda se vytvořil sekundární dentin, dokončete vyčištění kavity a vyplňte stálou výplní.

PŘÍMÉ PŘEKRÝVÁNÍ

Tyto delikátní techniky Vám zaručí vynikající výsledky pouze v případě, že pulpa není gangrenózní (test vitality) a nebyla infikována septickými dentinálními zbytky. Doporučuje se vždy před nanesením Calcipulpu provést antibiotickou léčbu.

Tato technika se provádí ve dvou krocích. Během prvního kroku, pod anesteticky a použitím exkavátoru, odstraňte změkklý dentin, který pokrývá pulpu. Dle vlastního posouzení se rozhodněte pro překrytí nebo pulpotomii.

Vyplňte zinkoxidovým eugenolovým gelem bez komprese.

Během druhé části, po odstranění gelu, naneste na pulpu Calcipulpe. Vysušte vzduchem, aby došlo k urychlení dehydratace. Eliminujte přebytky produktu na stěnách kavity. Poté vyplňte zinkoxidových eugenolovým gelem bez komprese. Pozvěte pacienta na kontrolu po 3 měsících, abyste zkontrolovali vitalitu pulpy.

OŠETŘENÍ A ZNECITLIVĚNÍ KORUNEK

Před umístěním korunek je třeba na obroušený zub nanést Calcipulpe. Poté je možno použít cementovou hmotu běžným způsobem.

UPOZORNĚNÍ A DOPORUČENÍ

S výrobkem je dodáváno speciální plastické pouzdro, které se nasouvá na jehlu a zabraňuje zatvrdnutí pasty v jehle. Před aplikací, oddělte stříkačku s Calcipulpe od plastické tuby a vytlačte požadované množství pasty pomocí točítka po směru hodinových ručiček. Jakmile vytlačíte potřebné množství, otočte tímto točátkem o ¼ v protisměru hodinových ručiček a jehlu použijte jako aplikátor. Odstraňte zbytek pasty sterilním tamponem a aplikujte tenkou vrstvu Calcipulpu na dno kavity. Vysušte vzduchem, aby se urychlila dehydratace. Odstraňte pastu ze stěn kavity. Calcipulp zatvrdne během 30-ti vteřin. Vyžadujete-li silnější vrstvu, naneste několik tenkých vrstev za sebou. Vždy dbejte na to, aby byly jednotlivé vrstvy dostatečně vysušeny! Po aplikaci, omyjte jehlu sterilním tamponem a okamžitě zasuňte do plastického obalu.

Způsobuje popáleniny (obsahuje kalcium hydroxid). V případě zasažení očí je okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařské ošetření. Používejte ochranné pracovní pomůcky – rukavice, štít. V případě nevolnosti vyhledejte okamžitě lékařské ošetření.