

CANAL +

Gel na ošetření kořenových kanálků

Vlastnosti:

- Lubrikuje kořenové kanálky a ulehčuje vnikání endodontických nástrojů
- Zvyšuje efektivitu tvarování
- Díky svým vlastnostem ulehčuje čištění kořenových kanálků

Indikace:

Gel na ošetření kořenových kanálků

Návod k použití:

Canal Plus je třeba opakovaně použít dle následující sekvence:

- Používaný nástroj pokryjte gelem pro lubrikaci
- Vytvarujte nástroj potřebné velikosti
- Naneste roztok 3% sodium hypochloritu

Operační technika:

1. Pulpa
 - a. Izolujte ošetřovaný zub pomocí gumového kroužku
 - b. Otevřete pulpu běžným způsobem
 - c. Nasadte aplikační špičku na stříkačku
 - d. Naneste Canal Plus
 - e. Naneste roztok 3% sodium hypochloritu pro odstranění nečistot a očistěte ústí kořenového kanálku
 - f. Vysajte tekutinu

2. Kořenový kanálek

Zde se použití Canal Plus odvíjí od anatomických možností kořenového kanálku, který hodláte ošetřit. Vždy se snažte zamezit nesprávnému rozšířování! Pro ošetření širokých a relativně rovných kořenových kanálků můžete začít použitím nejmenších nástrojů. V případě úzkých, zavápněných či nepravidelně vytvarovaných kořenových kanálků bude třeba přístup nejdříve vytvarovat použitím větších nástrojů. Poté lze nanášet Canal Plus. Nástroje je třeba před použitím patřičně vytvarovat.

Poté pokračujte v pokrývání nástrojů Canal Plus dle běžných pracovních postupů. Kanálek vypláchněte hypochloritem, vysušte a vyplňte jako obvykle.

Upozornění:

Zamezte použití Canal Plus přímo s největším nástrojem. Ačkoliv je vysoce rozpustný ve vodě, dbejte na to, aby v kanálku nezůstaly žádné zbytky Canal Plus. Canal Plus nesmí být ponechán v zubu mezi jednotlivými návštěvami.

Zvláštní upozornění:

C – Corrosive (obsahuje urea hydrogen peroxide)

Způsobuje popáleniny

V případě zasažení očí je vypláchněte vodou a vyhledejte lékařské ošetření.

Během práce používejte patřičné ochranné oblečení, rukavice a roušku. Pocítíte-li náhlou nevolnost, vyhledejte ihned lékaře!

Balení:

3.5 g stříkačky + 5 špiček