

NÁVOD K POUŽITÍ

A. S přímou kompozitní náhradou při použití All Bond nebo One Step (Plus):

1. Izolujte zub a ošetřete kavitu tradičním způsobem.
2. Naleptejte dentin a sklovinu 15 sekund leptadlem např. Uni-Etch podle návodu od výrobce. Suchý, ale ne úplně vyschlý, povrch je ideální před nanesením Cavity Cleanseru.
3. Navlhčete dentinový povrch štětečkem nebo houbičkou s Cavity Cleanserem.
4. Odstraňte zbytek roztoku navlhčenou houbičkou. Nevysušujte!!!
5. Naneste adhesivum jako např. All Bond2 nebo One Step (Plus) podle návodu výrobce.
6. Umístěte kompozitum a dokončete.

B. S nepřímou nebo provizorní náhradou:

1. Dokončete přípravu zubu, opláchněte vodou a vysušte vzduchem.
2. Navlhčete povrch dentinu štětečkem nebo houbičkou Cavity Cleanserem.
3. Vysušte vzduchem 1 sekundu, abyste odstranili zbytek roztoku.
4. Pokračujte s umístěním nepřímé nebo provizorní náhrady.

BALENÍ

Lahvička Cavity Cleanser 7 ml + návod + příslušenství

B-2807A

Lahvička Cavity Cleanser 135 ml + návod + příslušenství

B-2816A

SKLADOVÁNÍ

Materiál skladujte při pokojové teplotě 22°C. Expirace jednotlivých materiálů je vyznačena na krabičkách.

ZÁRUKA

Společnost Bisco se zaručuje vyměnit poškozené produkty. Společnost Bisco nepřijímá odpovědnost za poškození či škody způsobené použitím produktu jinak, než je uvedeno v návodu. Před prvním použitím je důležité si podrobně přečíst návod. V případě nejasností kontaktujte dodavatele.

AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:

Hu-Fa Dental, Moravni 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 27, fax: 577 926 205, e-mail: hufa@hufa.cz, www.hufa.cz