

COE-PAK**OBECNÉ INFORMACE**

Periodontická pasta. Neobsahuje eugenol ani azbest. Před použitím si nejprve důkladně přečtěte instrukce. Pouze pro použití v dentální praxi a na odpovídající případy.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Používejte Coe-Pak v případě nutnosti použití periodontické pasty.

- neobsahuje žádný eugenol – neškodí citlivé tkáni v ústech nebo nezpůsobuje popraskání plastických oprav
- zvýšená tvrdost – neláme se a nezanechává ostré okraje čímž zabraňuje poranění tkáně
- kompletní stabilita – nemění své vlastnosti během doporučeného skladování
- jemnost, kohéznost, snadná tvarovatelnost do požadovaných tvarů
- v ústech nezanechává žádnou pachut', zachovává si čistotu

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Míchejte spatulou a na COE míchací podložce. Nepoužívejte rigidní nebo úzkou spatulu. Pomalé míchání je velice důležité. Snadněji proveditelné se širokou a flexibilní spatulou.
2. Používáte-li COE-Pak Automix, zasuňte kartdridž do aplikátoru a připevněte míchací špičku. Na míchací podložku vytlačte požadované množství COE-Pak (nestiskávejte aplikátor více než 4x). Míchací špičku Automix ponechejte nasazenu.
3. Nepoužíváte-li Automix – vytlačte shodné množství pasty z tuby katalyzátoru a báze. Míchejte cca 30 – 45 vteřin nebo do doby, dokud pasta nemá jednotnou barvu. Potřebujete-li zvýšit tvrdost, přidejte před mícháním do růžové pasty (katalyzátor) malé množství prášku oxidu zinku.
4. Pomocí spatuly zformujte míchanou pastu do cylindrického tvaru.
5. Prsty nejdříve navlhčete tenkou vrstvou vazelíny, lanolínu, krému či vody a zkontrolujte lepkavost pasty (pasta by se měla zbavit lepkavosti pro 2 – 3 minutách, 1 min pro Hard & Fast).
Poznámka: COE-Pak Automix je možno zkontrolovat po 30 vteřinách, není třeba navlhčovat prsty.
6. COE-Pak je možno upravovat cca 2 – 3 minuty pro míchání. Pomocí prstů na míchací podložce vytvořte cylindrické tvary (1 min pro Hard & Fast).
7. COE-Pak zůstává v opracovatelné formě cca 10-15 minut (5 – 8 min pro Hard & Fast a min. 8 min pro Automix). Během této doby je možno pastu upravovat dle potřeby.
8. Během pracovní části je COE-Pak velice kohézní – lez jej tvarovat do různých svazků různých poloměrů pro snadné umístění.

SROVNÁNÍ COE-PAK/COE-PAK HARD&FAST/COE-PAK AUTOMIX

(shodné délky, 30 sek míchací čas)

	Coe-Pak	Coe-Pak Hard&Fast	Coe-Pak Automix
použitelnost po míchání	3 min	1 min	30 sekund
konzistence	plastická	tvrdá, stále plastická	plastická
pracovní čas	10 – 15 min	5 – 8 min	nejméně 8 min
možnost bondování jednoho materiálu ke druhému	10 – 15 min	5 – 8 min	8 – 12 min
finální tvrdost	30 min (stále přizpůsobivý, ale ne křehký)	10 min (tvrdší než Coe-Pak, ale ne křehký)	10 min

UPOZORNĚNÍ:

U některých pacientů bylo pozorována zvýšená citlivost na některé ze složek pasty – od zarudnutí, nevolnosti až po zvracení. Před použitím se nejdříve přesvědčte, že pacient netrpí výše zmíněnými problémy.

Maximální životnost produktu je 24 měsíců od data výroby.

AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:

Hu-Fa Dental, Moravni 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 27, fax: 577 926 205, e-mail: hufa@hufa.cz, www.hufa.cz