

DELTA LINK

Delta-Link je světlem polymerující systém pro bondování pryskyřičných náhrad na nedrahoukovové slitiny a titan. Systém se skládá z pasty báze, opákního prášku a opákní tekutiny.

Složení

Pasta báze: metyl-metakrylát obsahující složku s fotoiniciátorem

Opákní prášek: anorganické plnivo s pigmenty a di-benzoylperoxidem

Opákní tekutina: metyl-metakrylát, oligomer, pentaerythritoltri/tetraacrylat

Pole působnosti

Zvýšení bondu mezi kovovými rámečky a pryskyřičnými náhradami při přidání sedel do snímatelných chrom-kobaltových náhrad.

Aplikace

1. pasta báze

Opískujte kovový povrch použitím čistého aluminiového abraziva s velikostí částic do 110 μ m. Odstraňte prach a mastnotu pomocí páry či acetonu. Po opískování, očištění a osušení kovového povrchu naneste vhodným štětcem jednu vrstvu 100 – 300 μ (0,1-0,3mm) pasty báze. Polymerujte materiál v polymerační jednotce s impulzní či halogenovou lampou při vlnové délce 320 – 500 nm po dobu 3 min. V případě jednotek s UVA trubnicemi polymerujte při vlnové délce 320 – 400 nm 5 min.

2. opáker

opákní prášek umístěte do čisté míchací misky a smíchejte s tekutinou do viskózní konzistence, která umožňuje pohodlné nanesení štětcem. Doporučujeme poměr 1:1. Poté aplikujte vrstvu na primer kovového povrchu. Opět polymerujte v polymerační jednotce. Opáker je duálně tuhnoucí (světlem a teplem). Z toho důvodu je zajištěno bezpečná polymerace i ve stíněné zóně (impulzní či halogenové světlo – 5 min, UVA trubice – 10 minut). Po smíchání je možno materiál použít pouze 1x, nikdy nepoužívejte suchý opáker.

Upozornění/bezpečnost

V případě alergické reakce na metakrylátové pryskyřice nepoužívejte. Nevdechujte prach a metakrylátové výpary vzniklé během pracovního procesu. Dbejte na to, aby nezpolymerovaný materiál nepřišel do styku s pokožkou, sliznicí či očima. Pracujte u stolu vybaveným odsáváním.

Skladování

Doporučená teplota pro skladování je 4 – 25oC. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. Nádobky skladujte řádně uzavřené a skladujte mimo dosah dětí. Nepoužívejte materiál po uplynutí doby expirace.

Balení

10 g opákní prášek (tuba)

10 ml opákní tekutina (lahvička)

7 g pasta báze (tuba)

PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:

Hu-Fa Dental, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 28, fax: 577 926 205, e-mail: hufa@hufa.cz, www.hufa.cz