

DÉTARTRINE S FLUORIDEM

Pasta pro leštění a fluoridaci zubu

Složení:

Zirkonium oxid	55.74g
Sodium fluorid	0.33g
35% formaldehydový roztok	0.10g

Vlastnosti:

Chemické, manuální či ultrazvukové čištění by mělo vždy být následováno vyleštěním což dokončuje tuto operaci – produkuje jemný povrch a následně velmi redukuje vznik zubní plaku.

Zajímavým faktorem v této léčbě je asociace s povrchovou fluorizací nově exponovaného enamelu, pro jeho ochranu před rizikem vnitřního chemického útoku.

Détartrine s fluoridem je dodáván ve formě bílé pasty s příjemnou příchutí.

Zirkonium oxid, leštící agent je zajímavý pro svoji jemnou hrubost. Rapidně leští enamel, kovové opravy, akrylátové a dentální cementy a ve stejném čase dokončuje akci mechanického a chemického čištění.

Indikace:

Leštění po čištění. Leštění výplní.

Návod k použití:

Aplikujte pomocí polishing cups a kulatých kartáčků.

Upozornění:

Je zde možná alergická reakce na formaldehyd.

Poznámky:

Doporučuje se na počátku a konci aplikace vypláchnutí úst.

Balení:

Nádoba 150g

Farmako-terapeutické zařazení:

Dentální produkt pro profesní použití

Výrobce:

Septodont, Francie