

DISCLOSE – Nátěrový indikátor plaku

OBECNÉ INFORMACE

Jednotlivé balení eliminuje znečištění dalšími roztoky. Natírá se pouze na požadovanou oblast. Na místě lze ponechat 10 vteřin před opláchnutím. Zasažené oblasti se zbarví do tmavě červena.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Jednou rukou stiskněte tubu na černém kroužku.
2. Druhou rukou držte aplikátor, nejlépe co nejbližší černému kroužku. Pohybuje dokud neporušíte plombu.
3. Aplikátor vyšroubujte z tuby. Vytáhněte.



UPOZORNĚNÍ

Děti mladší 6-ti let by měli používat systém pod dohledem dospělé osoby. Pouze pro použití v ústech. Nepolykat. Červené barvivo zanechává trvalé skvrny na tkanině nebo dalším materiálu v případě kontaktu. Skladujte při pokojové teplotě

OBSAHUJE:

- aktivní ingredience
 - červené barvivo (1.5%)
- neaktivní ingredience
 - sorbit draslíku
 - kyselinu sorbovou
 - methylparaben
 - propylparaben
 - glycerin
 - vodu

AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:

Hu-Fa Dental, Moravni 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 27, fax: 577 926 205, e-mail: hufa@hufa.cz, www.hufa.cz