

# ENAMEL BONDING SYSTEM

**Je univerzální světlem tuhnoucí sklovinný bond. Set obsahuje kyselinové leptadlo a světlem tuhnoucí sklovinný bond resin. Je vhodný ke všem typům kompozit. Zvyšuje mechanickou adhezi a snižuje možnost vzniku mikrovýtoků a marginálního zbarvení.**

## NÁVOD NA POUŽITÍ

1. Vyleštíte sklovinný povrch pomocí bezfluoridové pasty. Vypláchněte a vysušte.
2. Zaisolujte zub pomocí bavlněného válečku nebo koferdamu tak, aby jste měli čistou a suchou pracovní plochu.
3. V případě potřeby naneste bázi nebo liner.
4. Naleptejte sklovinu pomocí 37% kyseliny fosforečné po dobu 20 sekund. Důkladně vypláchněte a vysušte. Pokud zub vykazuje větší resistenci letání, zopakujte leptací postup dokud nebude mít povrch matně bílý vzhled.
5. Naneste vrstvu světlem tuhnoucího bond resinu na naleptanou sklovinu.
6. Osvícujte vrstvu resinu po dobu 30 sekund.
7. Ihned poté pokračujte s aplikací světlem tuhnoucího kompozitního materiálu.

## UPOZORNĚNÍ:

Chraňte okolní zuby v průběhu leptání.

Po naleptání vždy důkladně vypláchněte a vysušte.

Vyhnete se kontaktu očí nebo kůže s leptací kyselinou. V případě kontaktu, ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

## OBSAH A TYPY BALENÍ:

2 Enamel Bonding Resin	3ml
1 Etching liquid	7.5ml

**Informace a objednávky zabezpečuje  
výhradní zástupce firmy ALPHADENT**

**Hu-Fa Dental Zlín  
Poliklinika  
765 02 Otrokovice  
tel,fax: 067/7922130**