

## ELITE LC TRAY

Světlem tuhnoucí pryskyřičná směs pro přípravu individuálních nosičů, dostupná v předtvarovaných ploténkách. Lze použít při denním světle nebo při umělém světle po určitou čas vyžadovaný pro modelaci. Snadná použitelnost s rozměrovou stabilitou, rigiditou a odolností v tahu.

Ploténky jsou dodávány v boxu zajišťujícím ochranu před světlem. Zbylý materiál je možno také dále skladovat v tomto boxu pro pozdější použití.

Elite LC Tray je možno polymerovat s jakýmkoliv druhem UV lampy (vlnová délka 350 – 400 nm) nebo halogenové lampy (vlnová délka 420 – 480 nm).

### POUŽITÍ

- individuální nosiče
- funční nosiče
- základní ploténky pro snímání skusu
- základny pro skládání zubů protězy
- připevnění teleskopických nebo sekundárních korunek

### NÁVOD K POUŽITÍ

#### Příprava

Na sádrovém modelu si vyznačte si místa ořezu pro individuální nosič. Odstraňte jakékoliv podsekřiviny. V případě nutnosti vložte do modelu voskové ploténky jako oddělovače. Jestliže není oddělovačů třeba, poté aplikujte tenkou vrstvu model izolátoru.

#### Aplikace

Z krabičky vytáhněte ploténku a ihned ji uzavřete (krabičku). Z pryskyřičné ploténky stáhněte ochranou fólii a položte ji do požadované pozice na model, tak aby správně seděla. Pomocí ostrého nástroje ji ořežte dle dříve vyznačeného místa ořezu a vymodelujte ji. Držátko modelu je možno vytvořit z přebytku materiálu.

#### Polymerace

Vložte model s ploténkou do halogenové či UV polymerační jednotky. Vytvrzení trvá cca 3 – 5 minut. Poté sejměte nosič z modelu, otočte jej a opět polymerujte 3 -5 minut. Opakovaná polymerace zlepšuje mechanické vlastnosti materiálu.

#### UPOZORNĚNÍ:

**Na povrchu vytvrzené pryskyřice vznikne gelovitá hmota, a to z důvodu inhibice přítomného kyslíku. Je důležité poté povrch očistit ubrouskem namočeným do etyl-alkoholu kvůli správné adhezi.**

#### Dokončení

Horkou vodou odstraňte veškeré zbytky vosku. Dokončete práci pomocí brousku na pryskyřici, zahlad'te smirkovým papírem a vyleštěte pískem.

#### UPOZORNĚNÍ:

Pracujte při zapnutém odsávání a dbejte na to, abyste nevdechovali prach. Stejně jako všechny metakrylátové pryskyřice, může i tato způsobit alergickou reakci při kontaktu s citlivou pokožkou. V tomto případě přestaňte výrobek používat.

#### Desinfekce

Kompatibilní s desinfekcemi běžně používaná pro nosiče otisků. Pro optimální desinfekci namočte nosič do Sterigum Liquid (Zhermack) na 10 minut.

#### Skladování a životnost

Elite LC Tray má životnost 3 roky při skladování v pokojové teplotě a chráněná před světlem. Neskladujte při teplotách překračujících 25°C.

#### **AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:**

**Hu-Fa Dental**, Moravni 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 27, fax: 577 926 205, e-mail: [hufa@hufa.cz](mailto:hufa@hufa.cz), [www.hufa.cz](http://www.hufa.cz)