

ELMA CLEAN 55d

Alkalický koncentrát pro desinfekci a čištění lékařských & dentálních, včetně rotačních a endoskopických nástrojů; neobsahuje aldehydy a fenoly

Popis

Koncentrát pro desinfekci a čištění v lázni za použití ultrazvuku, ale i bez něj. Určený pro běžné i chirurgické nástroje a zvláště pro rotační dentální nástroje (vrtáčky, kotouče, leštiče, nástroje pro kořenové kanálky) a endoskopii. Odstraňuje krev, proteiny, sliny a také zbytky tkáně a kosti. Vhodné pro nerezové, ocelové a tvrzené – také s diamantovým povrchem, plastové a keramické nástroje. Nevhodné pro hliníkové a lehké-kovové slitiny. Splňuje normy VAH a RKI. Nositel EC certifikátu č. 004804MR2.

Aplikace a dávkování

Dávkování a expoziční čas

Desinfekce v lázni aqu.soln 2% při pokojové teplotě po 15 min: fungicidní, baktericidní (vč. TBC), virucidní (dle RKI omezně, vhodná pro HCV, HIV, HBV). Po 5 min: fungicidní, virucidní (omezeně dle RKI), baktericidní (mimo TBC).

Čištění

20 – 70 °C, čerství zbytky krve a proteinů se odstraňují pod 42°C.

Po desinfekci a čištění opláchněte nástroje pod tekoucí vodou.

Bezpečnostní doporučení

Elma Clean 55d je klasifikováno jako korozivní, poškozující a nebezpečné pro životní prostředí. Vždy zacházejte s chemikáliemi opatrně.

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Hustota: 1010 g/l, pH 11.5 v původním stavu. Obsahuje 5-15% neionických činidel, <5% fosfonátů, <5% NTA, desinfekce, vůně. Činidla splňují kritéria pro biodegradaci dle EC nařízení č. 648/2004. Desinf. Prvky ve 100g: 12.6g trialkylethoxyamoniumpropionát, 14g tert. Alkylamin.

Likvidace

Použitý 2% roztok je možno vylít do výlevky; zkontrolujte kontaminaci a postupujte dle místních nařízení. Koncentrát je nutno zlikvidovat jako zvláštní odpad dle místních nařízení – tekutý koncentrát obsahující nebezpečné činidla.

Balení, skladování a transport

Balení: 1l láhev nebo 2.5l plechovka

Skladujte v původních, řádně uzavřených obalech při teplotě 0 – 35°C na dobře větraném místě, stranou od zdroje tepla a přímého slunečního záření. Neskladujte společně s jídlem.

Životnost: 3 roky od data výroby

PRODEJ V ČR ZAJIŠTUJE FIRMA:

Hu-Fa Dental, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 28, fax: 577 926 205, e-mail: hufa@hufa.cz, www.hufa.cz