

# Emmenix - filmy a vývojka.

## Návod k použití

### Výměna láhvi

Vyšroubujte plastové víčko a našroubujte zpět mechanickou část s tlačítkem a jehlou.

### Pozor:

- 1, Roztok vývojky je silně zásaditý. Nepotřísněte pokožku. V případě potřísnění opláchněte proudem vody.
- 2, Aby se zabránilo rychlé oxidaci vývojky v láhvi, je povrch chráněn vrstvou parafinu. Nepoužívejte tekutinu s parafinem, je-li láhev téměř prázdná.
- 3, Po otevření láhve spotřebujte tekutinu pokud možno v průběhu jednoho měsíce.

### Expozice filmu.

Optimální expozici je třeba stanovit pro každý RTG přístroj individuálně. Pohybuje se mezi 0,15 - 0,30 sek.

### Vyvíjení

- 1, Vložte jehlu mechanické láhve do pouzdra filmu mezi dvě uzavřené linky.
- 2, Stlačte tlačítko na vrcholu láhve. Asi 3 ml tekutiny se vpraví do pouzdra.
- 3, Množství vývojky můžete regulovat hloubkou stlačení tlačítka.
- 4, Třepáním po dobu 30 sek. se film vyvolá. Vývojku můžete nechat působit až 1 hodinu. Při nižší teplotě než 25°C prodloužete dobu na 40 - 60 sek. Nestlačujte film prsty příliš silně.

### Otevření pouzdra

Roztrhněte chlopně pouzdra.

### Ustalování

Ustalování prodlouží životnost snímku, není však nezbytné.  
Ustalovač připravíte rozpuštěním bílého prášku, přiloženého v balení, v 300 ml vody.  
Na několik minut ponořte film do ustalovacího roztoku.

### Opláchnutí

Opláchněte film pod tekoucí vodou po dobu min. 30 minut.

### Sušení

Sušení probíhá optimálně ve stínu v proudícím vzduchu.