

ESPE EPIPAK - Lösung

Epipak TEKUTINA

Informace pro použití

Odšroubujeme uzávěr s otvorem, odstraníme těsnění, nasadíme pipetu a přitáhneme opět uzávěrem s otvorem EPIPAK kroužky položíme na skleněnou destičku a pokapeme tekutinou EPIPAK tak, aby byly kroužky tekutinou dokonale pokryty. Před použitím kroužků vyčkáme, než budou tekutinou zcela nasáknuty. EPIPAK tekutina neobsahuje adrenalin nebo noradrenalin a její použití je bez rizika.

Váš dodavatel:

Hu-Fa Dental, Moravní 909, 765 02 Otrokovice
tel. 067/ 792 62 26 – 7, 067/ 792 62 05

ESPE EPIPAK - RINGE

Epipak KROUŽKY

Návod k použití

Zvolíme vhodnou velikost kroužku podle velikosti pahýlu. Kroužek smočíme v roztoku EPIPAK a nasuneme co nejhlouběji do gingiválního sulku. Necháme působit asi 5 minut a odstraníme bezprostředně před braním otisku. Optimální reakce docílíme tak, že kroužky překryjeme provizorní prací z materiálu PROTEMP II a necháme působit delší dobu. Kroužky EPIPAK se dodávají v pěti velikostech.

Váš dodavatel:

Hu-Fa Dental, Moravní 909, 765 02 Otrokovice
tel. 067/ 792 62 26 – 7, 067/ 792 62 05