


ČEPY EVOLUTION


NÁVOD K POUŽITÍ

1. připravte si kořenový kanálek tradičním nástrojem a postupem.
2. vypláchněte kanálek
3. připravte si kanálek speciálním kalibrovaným vrtáčkem s použitím pravého úhlu a tlakem; chladte dostatkem kapaliny
4. vypláchněte kanálek
5. vysušte kanálek papírovými čepy
6. naleptejte kanálek leptacím gelem
7. vypláchněte kanálek speciální vyplachovací jehlou, opakovaným vypláchnutím odstraníte gel ze stěn kanálku; dbejte na dokonalé opláchnutí – i malé množství zbytkového gelu může narušit cementaci
8. vysušte kanálek papírovými čepy
9. do kořenového kanálku aplikujte adhezivum (postupujte dle instrukcí výrobce)
10. polymerujte adhezivum (postupujte dle instrukcí výrobce)
11. očistěte povrch čepu alkoholem
12. osušte vzduchem
13. aplikujte adhezivum na čep (postupujte dle instrukcí výrobce)
14. polymerujte adhezivum (postupujte dle instrukcí výrobce)
15. vstříkněte cement do kořenového kanálku
16. aplikujte malé množství cementu na čep
17. zasuňte čep do kořenového kanálku
18. podržte čep v pozici do zatvrdnutí cementu
19. v případě nutnosti korekcí použijte fluid-kompozita
20. finální vzhled dáte opravě pomocí jemného diamantového vrtáčku či jemného kovového vrtáčku


PRACOVNÍ POSTUP ČEPŮ EVOLUTION: VE 3 KROCÍCH

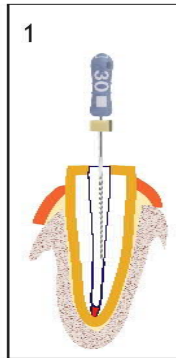


1
připravte kořenový kanálek tradičním nástrojem

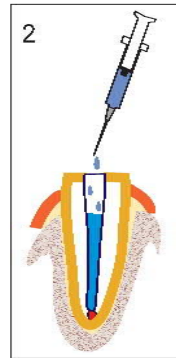

2
vypláchněte kanálek

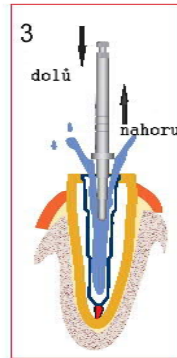


3
připravte si kanálek speciálním kalibrovaným vrtáčkem s použitím pravého úhlu a tlakem; chlaďte dostatkem kapaliny

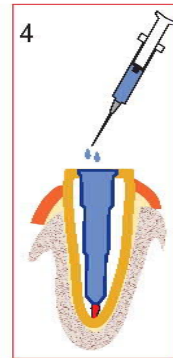


První krok

4
vypláchněte kanálek

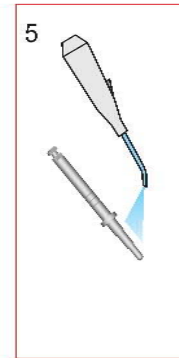


5
vyčistěte a ochlaďte vrtáček vodou a pokračujte v preparaci

Druhý krok

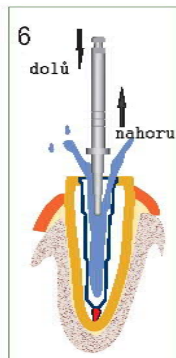

6
připravte druhou část kanálku spec. kalibrovaným vrtáčkem s použitím jemného tlaku; chlaďte dostatkem kapaliny

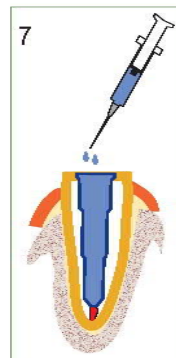


7
vypláchněte kanálek




8
vyčistěte a ochlaďte vrtáček vodou a pokračujte v preparaci


Třetí krok

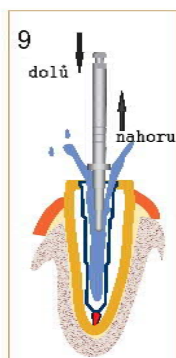

9
připravte finální část kanálku spec. kalibrovaným vrtáčkem s použitím jemného tlaku; chlaďte dostatkem kapaliny

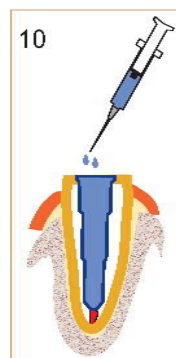


10
vypláchněte kanálek

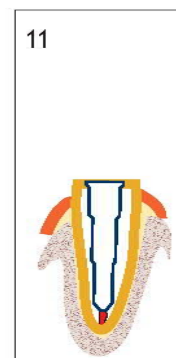


11

je nutno splnit všechny 3 po sobě jdoucí kroky, aby bylo dosaženo fin. výsledku; nelze ho dosáhnout v jednom kroku bez čištění a chlazení vrtáčku!

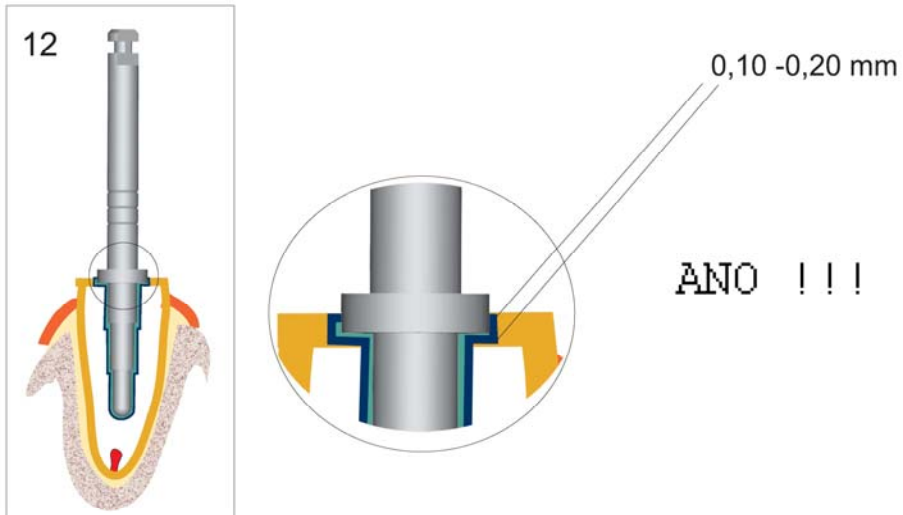

Jakmile velká část vrtáčku dosáhne cervikálního okraje, pokračujte dále pouze 0,10 - 0,20 mm!!!

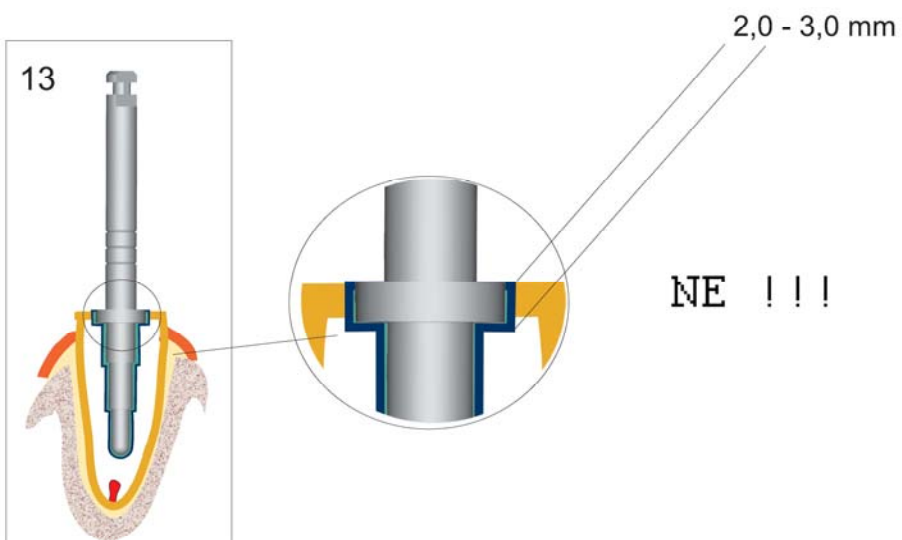

AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:

Hu-Fa Dental, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 27, fax: 577 926 205, e-mail: hufa@hufa.cz, www.hufa.cz