

Expasyl - dočasná retrakce dásně

Nejvíce inovační výrobek roku 2002 v USA, to je jen jedno z mnoha ocenění, kterých se dostalo tomuto výrobku z laboratoří PIERRE ROLLAND na celém světě. Expasyl byl mnohokrát testován a výsledky testů se vzácně shodují: V mnoha situacích Expasyl rozhodně šetří čas díky své spolehlivosti a snadné použitelnosti. Systém je efektivní, jednoduchý a rychlý, bezpečný, bezbolestný, zabraňující krvácení, spolehlivý a navíc i ekonomický.

- 1. Jednorázová příprava** - Velmi snadná příprava aplikátoru.
- 2. Snadné používání** - Vymačkáváním dostatečného množství produktu zcela zaplníte sulkus, aby se docílilo odpovídající retrakce.
- 3. Kořenová dostavba** - Aplikace expasylu hrotem, který je v kontaktu s cervikálním okrajem. Odtok pasty z hrotu Vám sám určí množství její aplikace.
- 4. Působení trvá 1 - 2 min. dle typu periodontální membrány** - U tenké periodontální membrány je postačující jedno-minutový kontakt, u středně silné nebo silné se

doporučují 2 minuty. 30 sekund je čas, který se doporučuje, pokud byl během preparace zubu odstraněn epitel z marginální gingivy.

5. Rychlé odstranění - Expasyl odstraní vodním sprejem při současném odsávání.

6. Otevření sulku

EXPASYL KIT

- 20 kapslí pasty (6 - 10 retrakcí z jedné kapsle)
- 40 jednorázových hrotů
- sterilizovatelný dávkovač

EXPASYL MINI KIT

- 6 kapslí pasty
- 12 hrotů
- sterilizovatelný dávkovač

EXPASYL kapsle

- doplňkové balení (6 - 10 retrakcí z jedné kapsle)
- 20 ks kapslí