

## GC FUJI LINING LC - světlem tuhnoucí skloionomerní cement

### Doporučené indikace

Pro použití pouze ve stomatologii doporučených indikacích. Jako báze nebo liner v preparovaných kavitách.

### Kontraindikace

Pacienti se známou alergií ne skloionomerní cementy. V případě alergie kontaktujte lékaře.

### Návod k použití

#### 1. Odměření prášku a tekutiny

- standardní poměr prášku a tekutiny je 1.4/1.0g, jedna zarovnaná odměrka prášku k jedné kapce tekutiny.
- pro přesné odměření prášku mírně poklepejte lahvičkou proti ruce. Netřepejte nebo nepřevracejte.
- držte lahvičku s tekutinou vertikálně a jemně stlačte
- lahvičku okamžitě po použití zavřete

#### 2. Míchání

Prášek a tekutinu umístěte na míchací podložku. Používejte plastovou špachtli. Rozdělte prášek na dva stejné díly. Smíchejte první díl s tekutinou za 5-10 vteřin. Vmíchejte zbývající množství a míchejte celek důkladně 15-20 vteřin.

#### 3. Technická aplikace

- zub preparujte běžnými technikami. Extenzivní mechanická retence není nezbytná.
- opláchněte a osušte, ale **NEPŘESUSUJTE**. GC Cavity Conditioner nebo GC Dentin Conditioner je doporučen pro odstranění roztěrové vrstvy. Pro překrytí pulpy použijte kalciumhydroxidový cement
- namíchejte odpovídající množství cementu
- odstraňte povrchovou vlhkost v kavitě, ale **NEPŘESUSUJTE**
- aplikujte cement do kavity za použití injekce nebo vhodného nástroje. Pokryjte dentin až po dentino-sklovinovou hranici
- vytvrďte světlem běžné polymerační lampy (470 nm vlnové délky) po 30 vteřin  
Poznámka: Jestliže vrstva cementu přesahuje 2 mm, použijte techniku vrstvení!
- pokračujte standardním kompozitem nebo amalgámovým výplňovým materiálem

### Skladování

Skladujte na chladném a temném místě (4-25°C), Zaručena 2letá životnost.

### Balení

- lahvička s 10 g prášku s odměrkou
- lahvička s 8g (6.8 ml tekutiny)
- balení 1-1: 10g prášku, 8g (6.8 ml) tekutiny, odměrka na prášek, umělohmotná špachtle, míchací podložky

### Upozornění:

Tekutina a namíchaný cement jsou agresivní. V případě kontaktu se sliznicí dutiny ústní nebo s pokožkou okamžitě odstraňte bavlněným hadříkem namočeným v alkoholu Opláchněte vodou. V případě kontaktu s očima okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Nemíchejte prášek nebo tekutinu s komponenty jiných skloionomerních cementů.

**AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:**

**Hu-Fa Dental**, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 27, fax: 577 926 205, e-mail: [hufa@hufa.cz](mailto:hufa@hufa.cz), [www.hufa.cz](http://www.hufa.cz)