

FUTAR OCCLUSION

POLE PŮSOBNOSTI A VLASTNOSTI

- extrémně tvrdý, otiskovací materiál založený na polyvinil siloxanu, rychle tuhnoucí
- stříkačkový otiskovací materiál, který je také určen pro použití v centrické okluzi
- materiál pro pokrytí otiskovacích lžic
- lokační materiál, pro zaznamenání gotického oblouku

Díky své finální tvrdosti je tento materiál jemně mletý. Díky svým thixotropním vlastnostem, Futar Occlusion je snadno aplikovatelný. Jeho pevná konzistence zamezuje zatečení do mezizubních prostor a umožňuje snadné vyjmutí z úst. Před aplikací doporučujeme místo aplikace vysušit.

Otisky sejmuté pomocí Futar Occlusion dokazují permanentní dimenzionální stabilitu.

TECHNICKÁ DATA

Celkový pracovní čas	Intraorální čas tuhnutí	Stupeň tvrdosti A	Lineární dimenzionální změny
Min. 30 vteřin	Min. 1 ½ min	90	-0.20%

Skladování: Skladujte na suchém místě, při pokojové teplotě (18 – 25°C).

Desinfekce: Sejmuté otisky lze desinfikovat např. Siloseptem.

Datum expirace: Vyznačeno na tubě.

Aby byly zajištěna maximální kvalita otisků, je třeba přesně dodržet celkový pracovní čas a intraorální čas tuhnutí. Dojde-li k razantní změně pracovní teploty (nad 23°C), jsou tyto časy ovlivněny.

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ APPLYFIX 4 – DISPENZNÍ PISTOLE

1. Vsuňte tubu do dispenzní pistole Applyfix 4. Ujistěte se, že vroubkování na tubě směřuje dolů. Není-li tuba správně a dostatečně zasazena do pistole, nelze uzavřít horní pojistku.
2. Sejměte uzávěr z tuby. Po použití jej lze vrátit.
3. Nenasazujte prozatím míchací kanylu. Vytlačte otiskovací materiál až je v obou komorách na stejné úrovni.
4. Nasadte kanylu na tubu a vytlačte požadované množství materiálu.
5. Po aplikaci nechejte kanylu nasazenou na tubě nebo ji vyměňte za původní uzávěr.
6. Před dalším použitím tuby, odstraňte a vyhodte použitou kanylu. Zkontrolujte otevřené místo tuby, aby zde nebyly žádné částičky ztvrdlého materiálu. Je-li zde zatvrdlá vrstva, odstraňte ji špičatým nástrojem a opět vytlačte dostatek materiálu, aby byly srovnány obě vrstvy.
7. Nasadte novou kanylu a pokračujte běžným způsobem.

Dispenzní pistoli Applyfix 4 lze sterilizovat v autoklávě.

UPOZORNĚNÍ:

- Roztoky aplikované před snímáním otisků (např. ústní vody) mohou zabránit správné tuhnutí reakci otiskovacího materiálu a musí být před aplikací vymyty vodou a poté místo aplikace vysušeno.
- Nikdy nenechávejte zbytky otiskovacího materiálu v orální kavitě.
- Zamezte nanesení materiálu na oděv. Nelze jej poté vyčistit.
- Není možno vyloučit alergickou reakci u citlivých pacientů.

AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:

Hu-Fa Dental, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 27, fax: 577 926 205, e-mail: hufa@hufa.cz, www.hufa.cz