

FINALE WAX SMOOTHER

PEČETIDLO VOSKŮ

1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

a. Balení

- 1 lahvička s kartáčkem pro aplikaci, naplněna 20 ml transparentní kapaliny
- 6 lahviček (20ml)

b. Výrobce

YETI Dentalprodukte GmbH
Industriestrasse 3
D-78234 Engen/Německo

c. Skladování

Ve vzpřímené poloze, suchu a při teplotě +15 až -30^oC. Během aplikace nekuřte. Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně.

2. POUŽITÍ

Toto pečetidlo vosků je speciálním přípravkem, který přilne k vosku. Používá se pro zapečetění a zahlazení žvýkací voskové oblasti, ale také zesiluje body kontaktu, bazální oblast nebo další nerovné voskové povrchy v laboratorní oblasti. Zanechává vrstvu 2-3 my (při aplikaci štětečkem).

V případě, že produkt není používán dle určení, firma Yeti se zbavuje jakékoliv zodpovědnosti a nepřijímá reklamací!

3. RIZIKA A NEBEZPEČÍ BĚHEM APLIKACE

- Dbejte na to, aby nekvalifikovaná osoba (např. děti) nepřišla do kontaktu s produktem. S produktem může pracovat pouze proškolená a zkušená osoba. Produkt je nutno používat dle instrukcí výrobce.
- Udržujte mimo dosah hořlavých zdrojů a nekuřte při používání!
- Pracovní místo musí být stabilní a dobře větrané.
- Modifikace nebo míchání produktu s jinými substancemi není dovoleno a vede ke ztrátě zodpovědnosti a záruky.
- Kapalina je hořlavá a je třeba ji udržovat mimo otevřený plamen.

4. PRACOVNÍ INSTRUKCE

a. Příprava

Přesvědčte se, že je lahvička neporušená. Otevřete ji.

b. Aplikace

Na objekt aplikujte tenkou vrstvu, v případě nutnosti opakujte.

c. Po aplikaci

Nechejte zaschnout cca 1 minutu a pokračujte hned v práci.

5. LIKVIDACE

Produkt likvidujte dle místně platných nařízení.

6. ŽIVOTNOST

Spotřební materiál by měl být použit v co nejkratší době po otevření.

AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:

Hu-Fa Dental a.s., Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 27, fax: 577 926 205, e-mail: hufa@hufa.cz, www.hufa.cz