

FORTIFY

kompozitní povrchové pečetidlo

NÁVOD NA POUŽITÍ

FORTIFY™ je světlem tuhnoucí, nízko viskozní, neplněná pryskyřice pro použití jako kompozitní povrchové pečetidlo, u kterého bylo prokázáno¹, že snižuje snášení distálních kompozit až o 45%.

Tvarování a leštění distálních kompozit pomocí rotačních nástrojů může způsobit mikropáry a povrchové nerovnosti, které mohou přispět ke kompozitnímu snášení během prvních 6 měsíců existence výplně. Kompozitní výplň zapečetěná pomocí FORTIFY je odolná proti abrazi a její dlouhodobá okrajová integrita je výrazně vylepšená. FORTIFY kompozitní povrchové pečetidlo je použitelné na všechny typy kompozit pro frontální i distální úsek a zlepšuje jejich odolnost proti abrazi.

NÁVOD NA POUŽITÍ:

1. Ihned po dokončení konečného vytvarování okluzní anatomie výplně a po jejím doleštění, důkladně opláchněte zub a výplň vodou, abyste odstranili veškeré zbytky.
2. Leptejte povrch výplně a zhruba 1-2 mm skloviny za spojením výplně a zubu, po dobu 15 sekund.
3. Důkladně vypláchněte vodou.
4. Vysušte povrch zubu a výplně vzduchem z bezolejového kompresoru.
5. Naneste malé množství FORTIFY na míchací podložku.
6. Natřete tenkou vrstvu FORTIFY na naleptanou sklovinu a výplň pomocí mikroštetěčku.
7. Jemné ofouknutí vzduchem zajistí rovnoměrné rozvrstvení pečetidla.
8. Zpolymerujte pečetidlo světlem halogenové lampy po dobu 20 sek.
9. Zkontrolujte okluzi.

U dříve zhotovených výplní – odstraňte proteinové částičky, plak a kontaminovaný povrch pomocí směsi vody a pemzy. Pokračujte s novou výplní.

FORTIFY je rovněž indikován jako pečetidlo na amalgámové výplně pro oblast okraje amalgám-sklovina. Použití je v takovém případě stejné jako výše popsané.

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte při pokojové teplotě.

OBJEDNÁVKY A INFORMACE:

Hu-Fa Dental Zlín, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 067/ 792 62 26-27, fax: 067/792 62 05.

¹ Dickinson, GL, Leinfelder, KF, Zkoumání dlouhodobého účinku povrchového průnikového pečetidla. JADA 124; 68-72, 1993.