

GEM CEM

Návod na použití

Gem Cem prášek je rychlý, vysoce odolný glasionomer. Smícháním s vodou vytvoří trvalý adhesivní cement.

Doporučujeme vertikálně protřepat lahvičku s práškem před použitím, protože prášek má tendenci se usazovat. Naplňte odměrku po okraj. Lahvička s tekutinou by měla být otočena vertikálně směrem dolů, aby dávkování kapky bylo přesné a čisté.

Smíchávání:

Míchací poměr: 2 lžičky prášku + 3 kapky tekutiny
Doba míchání: 15 sek.
Pracovní čas: 2 min.
Doba tuhnutí: 2 min.
Celkový čas: 4,5 min. při 23C

Prášek by měl být umístěn na míchací podložku samostatně. První porce prášku by měla být vmíchána do tekutiny a jakmile bude prášek zcela vlhký přidejte druhou porci prášku a rychle smíchejte až dosáhnete hladkou, krémovou konzistenci připravenou pro účely cementování. Správně smíchaný cement aplikujte nejdříve na čistý, suchý povrch náhrady, kterou poté aplikujete na suchý, preparovaný zub. Přebytečný cement poté odstraňte během jeho gumové konzistence, ještě předtím než dojde ke konečnému ztuhnutí..

Upozornění:

Gem Cem je adhesivní cement. Míchací podložku a špachtli je nutné očistit namočeným hadříkem ještě před ztuhnutím.

Tekutina obsahuje PAA. Vyhněte se kontaktu tekutiny s očima. Pokud se tak stane, důkladně vypláchněte oči vodou, pokud je potřeba vážné vyhledejte lékařskou pomoc.

Lahvičky by měly být uchovávány v normálním, suchém prostředí. Víčka lahviček musí být pevně zašroubovány ihned po použití.

Výrobce: Dental Comosite Ltd., Belvedere, Kent, UK

Výhradní zástupce: Hu-Fa Dental, Poliklinika, 765 02 Otrokovice, tel.: 067/924451-1.275, tel.,fax: 067/792 21 30