

Gem Line

Gem Line je zdokonalený glasionomerní podložkový materiál na bázi pasta/pasta použitelný jako podložka pod všechny výplně. Tento výrobek má velmi zvláštní vlastnost, že je schopen bondovat přímo na dentin a sklovinu. Gem Line vytváří rovněž chemický bond na kompozitní materiály. Leptání kyselinou není tedy nutné.

Gem Line je zcela biokompatibilní a nedráždivý na tkáň pulpy a je typickým glasionomerem s vlastností uvolňování fluoridů.

Smíchávání:

Vytlačte stejné množství z každé tuby na míchací podložku. Smíchejte obě části po dobu 20 sek. Použijte zakulacenou sondu pro nabrání smíchané pasty a rozetřete ji na dno kavity. Zpolymerujte standardní halogenovou lampou. Ihned po použití uzavřete tuby.

Pracovní čas: 1 až 3 min. Doba tuhnutí: 30 sek.

Indikace:

Jako trvalá podložka pod všechny typy výplní. Jako dočasná výplň fisur a oblastí krčkových erozí.

Upozornění:

Jedná se o adhezivní materiál. Vyčistěte proto špachtli po použití.

Balení:

tuba báze, tuba katalyzátoru, míchací podložka

Uchovávání:

Uchovávejte v chladné, suchém prostředí. Chraňte před přímým teplem a světlem.

Dlouhodobé skladování:

Po delší době nepoužívání může pasta katalyzátoru ztvrdnout. Tomuto se vyhnete jemnou masáží tuby mezi prsty při důkladném uzavření tuby.

Objednávky a informace Vám poskytne:

Hu-Fa Dental, Poliklinika, 765 02 Otrokovice, tel.,fax: 067/7922130.