

GEO WAXFINISH

GEO Waxfinish je dentální leštící vosk, který nezanechává žádné zbytky na finální práci. Transparentní vrstva laku zahlazuje jakékoliv nerovnosti povrchu, způsobené modelováním a úpravou vosku. Lze jej používat pro korunky, můstky, modelové a finální otisky. GEO Waxfinish dává okluzálním povrchům přirozený a profesionální vzhled. Ošetření povrchů GEO Waxfinish umožňuje jejich rychlejší dokončení.

APLIKACE:

GEO Waxfinish nanášejte v tenkých a rovnoměrných vrstvách. U okluzálních povrchů započněte v nejhlubších místech a pokračujte směrem ven. Pro aplikaci na citlivá místa používejte jemný štěteček (např. opotřebený štětec na keramiku).

- aplikace jedné vrstvy GEO Waxfinish dosahuje tloušťky cca 5 – 10 nm
- před aplikací další vrstvy počkejte cca 2 min
- před započetím další práce ponechejte vše zaschnou minimálně 10 min
- přidáním ředidla můžete individuálně ovládat konzistenci a tloušťku vrstvy



UPOZORNĚNÍ:

Ředidla, se kterými se lze setkat ve většině zvlhčovacích voskových agentů reagují s GEO Waxfinish! Pro povrchy ošetřené GEO Waxfinish používejte prosím voskové zvlhčovací agenty bez rozpouštědla nebo zředěné oplachovací roztoky.

BALENÍ:

Nr. 1553-0000 GEO Waxfinish Set

Nr. 1553-0100 GEO Waxfinish náhradní balení

Nr. 1553-0200 GEO Waxfinish náhradní balení - ředidlo

AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:

Hu-Fa Dental, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 27, fax: 577 926 205, e-mail: hufa@hufa.cz, www.hufa.cz