

GAP SEAL

Pečetění závitu abutmentu a implantátu

APLIKACE

Gap Seal je ideální pro pečetění kapilárních mezer a dutých prostor pro všechny aplikované implantáty. Měl by být použit už od úplného počátku, např. okamžitě po umístění implantátu při šroubování do jisticího šroubu tak, aby byl implantát již chráněn během doby léčby. Doporučujeme použít Gap Seal opět hojně pro každý otvor implantátu, např. před zašroubování léčící čepičky apod.

KONTRAINDIKACE, PREVENCE A UPOZORNĚNÍ

Gap Seal by neměl být polykán nebo přijít do kontaktu s otevřenou ránou. V případě zvýšené citlivosti na některou ze složek, přestaňte Gap Seal používat.

V případě cementace supra-struktury, je třeba Gap Seal odstranit alkoholem nebo xylolem. V opačném případě není garantována.

VEDLEJŠÍ ÚČINKY, RECIPROČNÍ REAKCE S JINÝMI PRVKY


Vedlejší účinky, reciproční reakce s léky či materiály nejsou známy a neobjevily se během klinických testů.

SLOŽENÍ

Vysoce viskozni silikonová matrice s thymolem.

BALENÍ

Gap Seal je balen ve sterilním blistru (každý s 10ti karpulemi). Aplikátor je autoklávovatelný do 134°C.

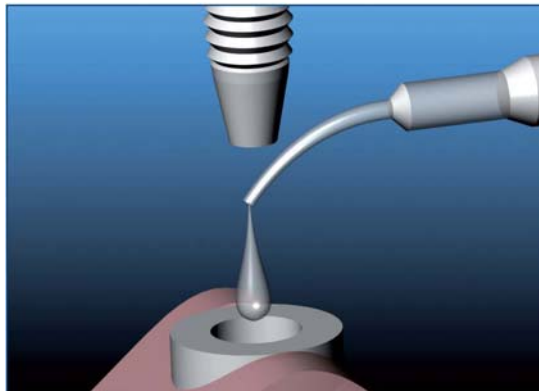

APLIKACE

Před uchycením 0.06ml karpule do aplikátoru je třeba nejdříve odsunout zpět západku posunutím transportního kolečka dopředu (obr. 1).

Nyní je místo uchycení karpule v aplikátoru uvolněno (obr. 2).

Kanyla je umístěna nad násadou aplikátoru tak, že je mírně ohnuta, ne zlomená (obr. 3).

Nyní je karpule vložena do aplikátoru ze shora (obr. 4).

Po sejmutí čepičky z ohnuté kynyly (obr. 5), pomocí pohybu transportního kolečka zpět pohněte západkou aplikátoru dopředu, Gap Seal je uvolněn (obr. 6).

Vnitřní část implantátu je naplněna odspodu (obr. 7).

V případě, že implantát byl již kontaminován, plní se po celkovém očištění (H₂O₂, alkoholem nebo xylolem) a vysušení, opět odspodu. Doporučujeme nanášet Gap Seal hojně také na podpěry a šrouby před vložení.

Karpule jsou určeny pro jednorázové použití, obsah je většinou dostatečný pro 1 – 2 implantáty dle použití.

CHARAKTERISTIKA

Gap Seal zaručuje dlouhotrvající zapečetění mezer a dutých prosto implantátů a tudíž zabránění vzniku auto či opakované infekce možnou kumulací bakterií v implantátu. Neobsahuje antibiotika. Gap Seal zůstává viskozni a je možno jej odstranit alkoholem nebo xylolem. Negativní vlivy na materiál a tkáň nejsou známy. Indikace je zvláště dána pro šroubované supra-struktury z důvodu mezer a závitů, ale doporučuje se i při cementaci, kdy cement musí také odolávat útoku bakterií, které mohou vniknout do implantátu.

Navíc díky vlastnostem Gap Seal je zacházení a šroubování malých šroubků a uzamykacích mechanismů více než pohodlné díky vysoké viskozitě materiálu (obr. 8).



AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:

Hu-Fa Dental, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 27, fax: 577 926 205, e-mail: hufa@hufa.cz, www.hufa.cz