

GELATAMP

VLASTNOSTI

Gelatamp je hemostatická želatinová houba s 5% příměsí koloidního stříbra. V případě aplikace na chirurgickou kavitu zajišťuje optimální léčbu ran a je možno je upravit do požadované velikosti a tím pádem jsou vhodné i pro menší kavitu. Porézní pěnovitá struktura absorbuje svou vlastní vahou několikanásobné množství krve. Podporuje agregaci trombocytů díky svému rozsáhlému povrchu a vyplňuje kavitu. Takto zformovaný čep má konstantní velikost, snadno zapadne a stabilizuje koagulaci krve. Slouží jako prevence vzniku fisur a sekundárních kavit, které by se bez Gelatampu mohly zformovat kontrakcí krevního koagulátu a infekce vzniklé invazí kontaminované salivy. Není zde nijakým způsobem bráněno vzniku kalusu. Tím je zamezeno vzniku a léčbě větších chirurgických kavit. Gelatamp v kavitě zůstává až do úplné absorpce – cca 4 týdny. Příměs koloidního stříbra má navíc antimikrobiální účinek a je netoxická. Koloidní stříbro není možno, ve srovnání s jinými antimikrobiálními přísadami, vypláchnout a svou nerozpustností zaručuje dlouhodobý efekt. Gelatamp je gamma-sterilizovaný.

SLOŽENÍ

Jedna houbička Gelatampu (14x7x7mm) obsahuje:

- tvrzenou želatinu Ph.Eur.97 9.5mg
- koloidní stříbro cod.fran.65 0.5mg

INDIKACE:

Léčba alveol a kavit, např. po extrakci, cystektomií, cystomií, apikální amputaci, perforaci maxilárního sinu, chirurgické odstranění nádoru nebo zbývajícího zubu. Prevence formace sekundární kavity. Profylaxe infekcí ran, sekundárního krvácení, jako obvaz po gingivektomii.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Po otevření aluminiového víčka je Gelatamp ihned připraven k použití. Velikost malých houbiček je možno upravit do požadované velikosti dle kavity a to bez mačkání. Pro větší kavitu můžete použít naproti tomu dvě menší houbičky. Houbička je vložena suchá a nezmáčknutá do vyčištěné kavity naplněné krví a ponechána, aby absorbovala co nejvíce krve (dle vizuální kontroly). Houbička by neměla vyčnívat přes gingivální okraj, aby nepříznivě neovlivňovala požadovanou epitelizaci. Takto je zajištěna definitivní léčba alveoly a není zde další potřeba vyplachování.

STERILITA:

Gelatamp je dodáván gama sterilizovaný. Sterilita nepoškozených a neotevřených balení je garantováno až do první aplikace. Poškozené balení není povoleno používat. Díky antimikrobiálnímu efektu je sterilita udržována až do vypotřebování houbiček či do doby expirace.

KONTRAINDIKACE:

Infikované sekrekční a purulentní zranění, hypercitlivost na stříbro či želatinu.

VEDLEJŠÍ EFEKTY:

V případě nesprávného použití dochází k prodloužení léčby, zvláště v případě kontaminovaných alveolárních prostor.

INTERAKCE S OSTATNÍMI LÉČIVY:

Mělo by být zamezeno současné použití alveolárních past, kavitárních čepů, stejně jako enzymových přípravků, jako je suchý pudr a zvlhčování tekutými substancemi či léčiv jako jsou anionaktivní povrchové činidla obsahující fenol, ethacridinový laktát, rozpuštěné minerální kyseliny a koncentrované slané roztoky. Rovněž dbejte na to, aby zde nebyl kontakt s peroxidem vodíku, který vybělí houbičku.

SKLADOVÁNÍ:

Gelatamp má vlhko-pohlcující charakter. Z toho důvodu je třeba dbát na správné uzavření balení a skladování v suchém, tmavém prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Gelatamp je použitelný 3 roky od data výroby. Je možno jej skladovat neotevřený a po otevření do doby expirace. Není možné jej používat po vypršení doby expirace. Nepoužité houbičky je možno odhazovat do koše s laboratorním odpadem. Plastické balení a aluminiové víčka by měla být recyklována.

BALENÍ:

20 houbiček REF 274 002
50 houbiček REF 274 007

AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:

Hu-Fa Dental, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 27, fax: 577 926 205, e-mail: hufa@hufa.cz, www.hufa.cz