

# ***IMPRESS***

Vinil Polysiloxanový otiskovací materiál

## **NÁVOD NA POUŽITÍ**

**UPOZORNĚNÍ:** Všechny Vinil Polysiloxany jsou tepelně sensitivní materiál. Uchovávejte je proto v chladnu a suchu max. do teploty 24°C.

### **Technika dvojího otiskování**

1. Změřte 2 stejné lžičky IMPRESS Putty Báze a Katalyzátoru (možno použít Stomaflex Solid) a smíchejte dokud nedosáhnete jednotné barvy. Umístěte smíchaný materiál do lžičky.
2. Vložte lžičku do úst a nechte ztuhnout.
3. Vyndejte lžičku. Odstraňte hmotu z mezizubních prostor v oblastech preparace včetně okluzních ploch. Ofoukejte čistým a suchým vzduchem, aby jste odstranili zbytky.
4. Vytlačte stejnou délku IMPRESS Light Body báze a katalyzátoru na míchací podložku.
5. Smíchejte krém důkladně dokud Vám nevznikne jednotná barva (30 až 45 sek.).
6. Umístěte krém do stříkačky. Vytlačte materiál kolem připravených zubů a všech interproximálních a okrajových oblastí. Vložte přebytečný materiál do lžičky a usad'te.
7. Pasivně držte lžičku dokud materiál neztuhne. Vyndejte hotový otisk z úst pacienta. Vypláchněte a vysušte. Na rozdíl od jiných otiskovacích materiálů nemusí být model opláchnut okamžitě, ale kdykoliv ve vhodném čase.

### **Technika dvojího míchání**

1. Vytlačte stejnou délku IMPRESS Light Body báze a katalyzátoru na míchací podložku.
2. Vytlačte stejnou délku IMPRESS Heavy Body báze a katalyzátoru na míchací podložku.
3. Smíchejte Light Body krouživým pohybem a smíchaným materiálem naplňte stříkačku. Poté co ji zaplníte nasad'te uzávěr.
4. Smíchejte Heavy Body krouživým pohybem a smíchaným materiálem naplňte stříkačku.
5. Vysušte preparované zuby. Naneste Light Body stříkačkou na všechny připravené povrchy včetně subgingiválních trhlin.
6. Vložte lžičku do úst. Usad't e lehkým tlakem a poté pasivně držte v pozici. Zkontrolujte nástrojem, zda je otisk kompletně ztuhlý.
7. Vyndejte lžičku z úst pacienta. Vypláchněte a vysušte. Na rozdíl od jiných otiskovacích materiálů nemusí být model opláchnut okamžitě, ale kdykoliv ve vhodném čase.

### **Užitečné poznámky**

- Míchací poměr je 1:1 jak hmotnostní, tak množství.
- Nikdy nenoste latexové rukavice při smíchávání solidových materiálů, protože to naruší dobu tuhnutí. Důkladně si umyjte ruce po sundání latexových rukavic před práci se solidem.
- Otisk může být pokoven jak stříbrem, tak mědí.

**Prac.čas:** 2 min. 45 sek.      **Min.doba na vytažení otisku z úst:** 6 min. (od počátku míchání)