

INTACT

Před použitím protřepat!

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Míchací poměr | 2 lžičky prášku na 3 kapky vody |
| Míchací čas | 15 vteřin |
| Pracovní čas | 2 minuty |
| Čas tuhnutí | 2 minuty |
| | CELKEM 4.5min při 23°C |

Jakmile zjistíte, že prášek má snahu tvrdnout, doporučujeme jej protřepat, aby získal prachovou konzistenci. Naplňte dávkovací lžičku po okraj. Nádobka na vodu by měla být naplněna do ½ destilovanou vodou a držena vertikálně dolů, aby bylo umožněno uvolnění kapek. Prášek na míchací podložku umístěte odděleně. Smíchejte s vodou první hromádku prášku. Jakmile je zcela navlhčená, přidejte druhou hromádku. Rychle míchejte, aby vznikla hladká, krémovitá hmota, připravená pro cementování. V tomto stavu by hladká směs měla být aplikována na attachment, který je poté usazen na připravený zub. Přebytečný cement jemně odstraňte ještě před finálním zatuhnutím.

Zvláštní upozornění:

Jedná se o adhezivní cement. Míchací podložka a špachtle musí být očištěna ubrouskem ještě před finálním zatvrdnutím. Cement obsahuje PAA. Zamezte zasažení očí. V případě zasažení je ihned vypláchněte vodou a vyhledejte lékařské ošetření. Skladujte na suchém místě. Dbejte na dokonalé uzavření nádoby.

AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:

Hu-Fa Dental, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 27, fax: 577 926 205, e-mail: hufa@hufa.cz, www.hufa.cz