

ISODAN

Ošetření dentinální hypercitivosti

Složení:

Potassium nitrát HEMA Sodium fluorid Vláknité přísady
--

Použití:

ISODAN je určen pro léčbu dentinální hypersensitivity způsobené dráždivými vlivy – fyzickými (teplo, zima) chemickými (vliv kyselého prostředí), fyziologickými (abraze, zubní eroze)

Indikace:

Dentinální hypersensitivita. Lze použít na všechny odkryté dentinové povrchy, ošetření korunek a cervikální eroze. Lze jej použít pod amalgámy a jakýkoliv ošetřující materiál

Kontraindikace:

Hypersensitivita na některou ze složek

Návod k použití:

- Izolujte jeden či skupinu zubů, jež mají být ošetřeny, bavlněným tampónem
- Opatrně vysušte povrch ošetřovaného místa
- Do malé lahvičky odkápněte kapku roztoku
- Naberte malé množství mikroštetčkem
- Aplikujte tenkou vrstvu na povrch
- Opatrně rozfoukněte
- Opakujte aplikaci 2 – 3 x, dokud není povrch lesklý
- V PŘÍPADĚ PŘETRVÁVÁNÍ PROBLÉMŮ OPĚTOVNĚ APLIKUJTE V TÝDENÍCH INTERVALECH

Upozornění:

Xi: dráždivý na oči a pokožku. Způsobuje přecitlivělost pokožky v případě kontaktu. Zabraňte kontaktu materiálu s pokožkou a zrakem. V případě zasažení omyjte vodou. Zamezte obrousování ošetřeného místa po 24 hodin. Zabraňte požití kyselého jídla či pití během 24 hodin.

Skladování:

Skladujte při teplotě nižší jak 25°C.

Balení:

1 x 5 ml lahvička + 20 aplikačních kartáčků