

## 100% PROVĚŘENÝ POSTUP



Pro preparaci použijte předvrtávač, který je součástí balení. Vložením čepu do kanálku vyzkoušíte, zda je preparace dostatečná.



Diamantovým diskem seřízněte čep. NIKDY nepoužívejte nůžky, aby nedošlo k roztřepení konců skleněných vláken. Povrch čepu vyčistěte alkoholem.



Po dobu 15 s naleptejte povrch kořenového kanálku. Důkladně vypláchněte a vysušte pomocí papírových čepů.



Aplikujte do kanálku i na čep dvě vrstvy One-Step Plus, jemně vysušte. Polymerujte lampou 30 s.



Na připravený čep naneste Duo Link a vložte jej do kořenového kanálku.



Přebytek Duo Linku ihned rozprostřete kolem korunkové části čepu. S čepem nehýbejte do té doby, než dojde ke ztuhnutí. Polymerujte 60 s.