

KETAC MOLAR

Skloionomerní výplňový materiál

Informace k použití

Popis výrobku

KETAC-MOLAR je skloionomerní cement. KETAC-MOLAR je k dostání v barvách A1, A3, A4 a tmavěžluté opakní (DYO).

Oblasti použití

- podložkové výplně pod kompozitní výplně kavit I. a II. třídy
- dostavby pahýlů pod korunky
- výplně dočasných zubů
- výplně kavit I. třídy mimo okluzi
- výplně kavit V. třídy, nestojí-li v popředí estetická hlediska
- dočasně výplně kavit I. a II. třídy

Příprava

Při preparaci lze zachovat zdravý dentin, neboť díky vazbě Ketac-Molaru na zubní tkáň není třeba provádět silné retenční zářezy. Je však třeba dbát na to, aby v oblasti okraje výplně nedosahovala síla stěny výplně hodnoty pod 0,5 mm.

Po preparaci očistěte důkladně plochy kavity vodním sprejem a osušte vzduchem.

Ochrana pulpy

V běžných případech je možno aplikovat Ketac Molar bez podložky. U hlubších kavit (tloušťka dentinu k pulpě méně než 1,0 mm) pokryje dno kavity kalciumhydroxidovým preparátem (např. ESPE ALKALINER).

Příprava kondicionérem

Pro umožnění dostatečné chemické vazby Ketac-Molaru na tvrdé zubní tkáni je nezbytná příprava kavity kondicionérem.

- KETAC CONDITIONER naneste na preparované plochy a nechte působit **30 sek.**
- Po té důkladně opláchněte vodou a osušte vzduchem. **Zabraňte přesušení!** Plochy připravené kondicionérem chraňte bezpodmínečně před kontaminací.

Časový průběh

Při pokojové teplotě (23°C) platí následující časy:

min : sec

Míchání	00:45
Zpracování	03:00
Vytvrzování	05:00

Při vyšší pokojové teplotě (>23°C) se proces vytvrzování urychluje.

Dávkování

1 zarovnaná lžička a 1 kapka tekutiny (prášek/tekutina 3/0).

- Lahvičku s práškem protřepete, aby se prášek uvolnil.
- Při odběru prášku otřete lžičku o plastové hrdlo, prášek nestlačujte.
- Prášek a tekutinu dávejte vedle sebe na podložku. Při dávkování tekutiny držte lahvičku kolmo.

Míchání

Prášek vmíchejte do tekutiny maximálně ve dvou porcích. Pastu roztírejte na podložce dokud nedosáhnete homogenní konzistence.

Aplikace

Ketac-Molar aplikujte po dávkách. Během aplikace zabraňte kontaminaci.

Ochrana výplně

Ketac-Molar je stejně jako všechny ostatní skloionomerní cementy během vytvrzování citlivý nejdříve na vlhko, poté na dehydrataci.

- Proto ihned po aplikaci a modelaci všechny volné plochy Ketac-Molaru potřete přípravkem Ketac-Glaze a 10 sek. vytvrzujte světlem.

Opracování

Opracování začněte nejdříve po 5 min. K zapečetění povrchu se doporučuje ještě jednou nanést Ketac-Glaze a 10 sek. vytvrzovat světlem.

Opracujte arkansaským kamenem, jemnozrným diamantem, leštícími disky s ubývající zrnitostí nebo silikonovými leštidly.

Čištění

Ketac-Molar ulpívá na kovových nástrojích, proto jej ještě před vytvrzením omyjte studenou vodou.

Snášenlivost

U citlivých osob nelze vyloučit přecitlivělost na Ketac-Molar, Ketac-Conditioner nebo Ketac-Glaze. V případě negativních reakcí použití těchto materiálů zastavte.

Skladování

Ketac-Molar, Ketac-Conditioner a Ketac-Glaze neskladujte při teplotě nad 25°C.

Trvanlivost

Po uplynutí data expirace již nepoužívejte.

Balení

Zaváděcí balení

Po 15 g prášku A1, A3, A4 a DYO
2 x 10 g tekutiny, Ketac-Conditioner,
Ketac-Glaze a příslušenství

Jednotlivá balení

Všechny součásti zaváděcího balení

HuFa
dental

Moravni 909, 765 02 Otrokovice,
Tel.: 067/ 792 62 26-27,
Fax: 067/ 792 62 05
e-mail: hufa@volny.cz