

LIGHT-CORE™
Transparentní světlem tuhnutí dostavbový kompozit

VŠEOBECNÉ INFORMACE

LIGHT-CORE je transparentní, skleněnými vlákny zesílený, světlem tuhnutí dostavbový kompozit. Díky transparentnímu odstínu je ideální pro použití pod estetické náhrady. LIGHT-CORE lze použít s adhesivními systémy 4-té a 5-té generace jako j ALL-BOND®* 2 nebo ONE-STEP®* a má 5mm hloubku polymerace.

NÁVOD NA POUŽITÍ

1. Pokud je indikován čep, nacementujte jej do kořenového kanálku podle návodu výrobce.
2. Naleptejte zbývající korunkovou zubní strukturu a aplikujte adhesivum, jako je ALL-BOND 2 nebo ONE-STEP, přesně podle návodu výrobce.
3. Vytlačte požadované množství LIGHT-CORE do míchací podložky chráněné proti světlu. Abyste zabránily vytlačení zbytečného materiálu, zatočte pístem proti směru hodinových ručiček ihned po vytlačení požadovaného množství. Pokud je čep umístěn, aplikujte kompozit kolem čepu a kompletně zaplňte preparaci. Pokud používáte kompulovou formu, vytlačte kompozit přímo kolem čepu a do preparace. Pokračujte v dostavbě dokud není preparovaná kavita zaplněna do požadované úrovně.
4. Zpolymerujte světlem 20 sekund.

*ALL-BOND 2 a ONE-STEP jsou registrované známky firmy BISCO, INC.

Skladování: Skladujte při pokojové teplotě (22 °C). Sledujte individuální šarže stříkaček pro přesné určení doby expirace.

Upozornění: Nezpolymerovaná pryskyřice může způsobit zvýšenou citlivost kůže u citlivějších osob. V případě kontaktu s kůží, místo důkladně opláchněte mýdlem a vodou.

Formy balení:

Stříkačkové balení

Obj.č. A-1727K

2 stříkačky (2.5g každá) LIGHT-CORE, návod/bezpečnostní list.

Kompulové balení

Obj.č. A-1725P

10 kompulí 0.25g každá) LIGHT-CORE, návod/bezpečnostní list.

Záruka: Bisco, Inc. přebírá zodpovědnost vyměnit výrobek, pokud se prokáže že je defektní. Bisco, Inc. nepřebírá žádnou zodpovědnost za jakékoliv poškození nebo ztráty, at' přímé nebo následné, vyplývající z použití nebo nemožnosti použít výrobek jak je popsáno. Je zodpovědností uživatele se před použitím ujistit o vhodnosti výrobku pro zamýšlenou indikaci. Uživatel si uvědomuje veškerá rizika a zodpovědnost z toho plynoucí.

Výrobce:

Bisco, Inc., 1100 W. Irving Park Rd., Schaumburg, IL 60193,
Tel.: 1-(800)-BIS-DENT, 847-534-6000

Importér pro ČR a SR:

Hu-Fa Dental, Moravní 909, 76502 Otrokovice
Tel.: 577 926 226-9, Fax: 577 926 205, E-mail: hufa@hufa.cz