

**LASTIC FUNCTION MEDIUM****STŘEDNĚVISKÓZNÍ, ELASTICKÁ A PŘESNÁ OTISKOVACÍ HMOTA ZALOŽENÁ NA POLYSILOXANU****POLE PŮSOBNOSTI**

- středně-viskózní otiskovací materiál pro funkční otisky
- středně-viskózní otiskovací materiál pro rebazovací otisky

**PRACOVNÍ ČAS A ČAS TUHNUTÍ**

Čas míchání	Aplikace	Kompletní pracovní čas	Intraorální čas tuhnutí	Celkový čas tuhnutí
1 min , ruční míchání	1 min	2 min	5 minut	7 min

Pro dosažení vynikajících výsledků je důležité použití přesného množství hmoty a dodržení pracovního času a času tuhnutí. Dojde-li ke změně doporučené teploty (23°C) bude zároveň ovlivněn čas tuhnutí a pracovní čas.

**NÁVOD K POUŽITÍ**

1. Naneste tenkou vrstvu kondenzačního polymeračního silikonového adheziva na otiskovací misku. Nechejte zaschnout.

**2. Příprava**

Použití Lastic Xtra vytvrzující pasty (výr. číslo 16113 – 60 ml Lastic Xtra Pastenhärter)

- Vytláče patřičné množství báze a pasty na míchací podložku

Zvýšením množství vytvrzující pasty nezkrátíte jen čas tuhnutí, ale i celkový pracovní čas. Za žádných okolností by nemělo množství přidané vytvrzující pasty překročit 25%.

**3. Míchání**

Pomocí míchací lopatky smíchejte pastu báze a katalyzátoru. Míchejte 1minutu dokud není směs patřičně promíchána a nemá stejnou barvu. Taktéž nesmí obsahovat vzduchové bublinky.

Zabraňte vnikání bublinek do materiálu jeho neustálým mačkáním během míchání.

**TECHNICKÁ DATA (ISO 4823)**

<b>Příprava:</b>	nanesení potřebného množství pasty báze a katalyzátoru 10 cm pasty báze (7.9 ml) + 10 cm vytvrzovací pasty (0.4 ml/0.4 g)
<b>Míchání:</b>	ruční s míchací lžičkou
<b>Skladování:</b>	na suchém místě při teplotě 18 – 25°C
<b>Desinfekce:</b>	otisk můžete desinfikovat např. roztokem Silosept
<b>Elektro-pokrytí:</b>	otisk můžete pokrýt měděnou či stříbrnou vrstvou
<b>Odlévání otisků:</b>	během 2 – 24 hodin, pomocí např. Tewestone nebo Tewaterock
<b>Životnost otisků:</b>	dle informací na tubě
<b>Lineární objemová změna:</b>	-0.60%
<b>Elasticita:</b>	99.0%
<b>Napětí po stlačení:</b>	8.0%

**UPOZORNĚNÍ**

- Zabraňte kontaktu s očima. V případě kontaktu vymyjte vodou a postiženého dopravte k lékaři.
- Používejte ochranný oděv. V případě kontaktu s oděvem nelze tento vyčistit.
- Možnost alergické reakce v případě citlivých osob nelze vyloučit.

**AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:**

**Hu-Fa Dental**, Moravni 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 27, fax: 577 926 205, e-mail: [hufa@hufa.cz](mailto:hufa@hufa.cz), [www.hufa.cz](http://www.hufa.cz)