

LUPOVÉ BRÝLE UNIVET

Obsah balení:

- chirurgické binokulární lupové brýle
- páska
- čisticí utěrka
- krabice
- návod k použití
- šroubovák
- boční štíty (nepřípevněné)

DŮLEŽITÉ: Před použitím si nejdříve pozorně přečtěte návod. Nikdy se přes brýle nedívejte přímo do slunce nebo zdroje silného světla, může dojít k poškození zraku!

Použití

Individuálně vyrobené chirurgické brýle se zvětšující lupou se používají během chirurgie pro zobrazení těch nejmenších detailů při zachování optimální pracovní vzdálenosti.

Teleskopy umístěné uvnitř brýlových čoček jsou umístěny individuálně dle potřeb každého uživatele (interokulární vzdálenost, dioptrická korekce atd.), aby bylo během práce dosaženo maximálního komfortu. Binokulární lupy se používají v mikrochirurgii, dentální mechanice, estetické chirurgii, vaskulární chirurgii a kardiochirurgii. Nejsou doporučeny pro použití pro neurochirurgii a další aplikace vyžadující velmi vysokou stabilitu obrazu, což není v tomto případě možné – brýle jsou nasazeny na chirurgově hlavě.

Typická aplikace:

- vaskulární chirurgie, dermatologická chirurgie, plastická chirurgie atd.
- implantologie, rekonstrukční chirurgie atd.

Návod k použití

Binokulární lupy jsou personalizované pro každého chirurga zvlášť. Níže uvedené parametry jsou přednastavené dle údajů z osobního formuláře:

- interokulární vzdálenost
- pracovní vzdálenost
- dioptrická korekce
- teleskopická korekce (rozdílným umístěním cíle – prismatická verze)
- dioptrická korekce lupy samotné (galilejská verze)
- inklinace nebo deklinace (v závislosti na interokulární vzdálenosti a pozici očí)
- pozice nosního můstku (při nasazení)

Před prvním použitím je nutno lupové brýle jemně doladit. V případě nutnosti nastavte boční nožky a vyzkoušejte. Binokulární systém by měl být při nasazení zajištěn páskou a boční štíty nasazeny na rám brýlí.

Brýle jsou vodě a prachu odolné a je možno je snadno čistit či desinfikovat. Jsou extrémně lehké a tím zajišťují dlouhou dobu použití bez únavy lékaře. Funkční a ergonomický design umožňuje lékařovi vidět mimo zvětšovací zónu.

Údržba

- lupové brýle nesmějí být sterilizovány
- čočky je možno čistit přiloženou mikrotextilní utěrkou, která snadno odstraňuje otisky prstů a prach; všechny ostatní povrchy je možno čistit alkoholem nebo zředěným mýdlovým roztokem a měkkou utěrkou; nepoužívejte rozpouštědla a abrazivní čisticí prostředky
- brýle je možno desinfikovat otřením ubrouskem namočeným v desinfekčním činidle; je možno používat pouze ordinární desinfekci pro vnější použití
- nečistěte v ultrazvuku
- pravidelně kontrolujte dotažení šroubků
- v případě likvidace brýlí postupujte dle místně platných nařízení

Záruka

Na brýle se vztahuje 2letá záruka ode dne prodeje. Záruka není platná v případě, že brýle jsou použity na jiný účel než zde předepsaný. Jakákoliv část brýlí nefunkční díky špatné produkci bude vyměněna během záruky zdarma. Záruka se nevztahuje na náhradní díly poškozené během použití, nesprávného použití či neoriginálních náhradních dílů či neodborných modifikací. V případě nutnosti opravy, kontaktujte autorizovaný servis.

AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:

Hu-Fa Dental, Moravni 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 27, fax: 577 926 205, e-mail: hufa@hufa.cz, www.hufa.cz