

Vazivový nůž Luxator

Doporučené použití

Vazivové nože Luxator jsou speciálně určené pro extrakci zubů. Celý zásah je prováděn s minimálním poškozením dásně, krvácení a postoperativní bolesti.

Postup použití

Ručka nože je ergonomicky tvarována pro optimální držení a kontrolu. Ukazováček položte na osu čepel tak, aby sloužil jako určitá zarážka pro maximální hloubku vniknutí – ukazováček slouží jako okluzální zarážka.

1. Umístěte špičku axiálně do periodontálního prostoru.
2. Pomocí jemného krouživého pohybu vsuňte špičku do otvoru. Tenká a ostrá špička odřezává ligamenty, tlačí na kost a jemně vyzvedává zub z lůžka.
3. Pokračujte zhruba do 2/3 hloubky ke kořeni, snažte se co nejvíce přiblížit ke stěně kořene. Zabraňte obrušování kořene.
4. Jestliže i nyní kořen pevně drží v lůžku, opakujte celý proces z druhé strany.
5. Zub je nyní luxován z lůžka.

Specifické případy/Doporučení

- Kompaktní kost je většinou nejsilnější na bukální straně, proto nejdříve luxujte palatálně/lingválně. Je-li instrument vsunut na bukální straně, dochází ke kompresi alveolární kosti a vzniku místa pro pohyb kořene v palatálním/lingválním směru.
- V případě extrakce spodního zubu jistě čelist volnou rukou, abyste zabránili přílišnému tlaku na čelistní kloub.
- Pro horní laterální řezáky vsunujte nůž souvisle s angulací patra
- Vícekořenové zuby je třeba před luxací nejdříve rozdělit
- Pro minimalizaci traumatu a poškození kosti si vždy pečlivě prostudujte rtg snímky pacienta, abyste se dozvěděli o orientaci zubu ve vztahu ke struktuře pacientovy kosti. Zvláště pak:
 - Umístění maxilárního sinusu ve vztahu k zubu
 - 2. a 3. moláry v čelisti a riziko fraktury čelistní tuberosity
 - Nervy a tepny v čelisti

Poznámka:

Špička nože je extrémně jemná a ostrá a lze ji snadno poškodit v případě používání jako páčidla. **Špička není určena pro silné páčení!** Po každém použití nástroj naostřete, jedine tak dosáhnete optimálních výsledků. Při ostření umístěte konkávní povrch na brousek, odtlačte a opakujte dokud není špička ostrá.

Sterilizace

Autokláv, horkovzduch **do 180°C** (poté může dojít k zbarvení rukojeti), chemikláv

Použitý materiál

Nerezová ocel, nylon

AUTORIZOVANÝ PRODEJ V ČR ZAJIŠŤUJE FIRMA:

Hu-Fa Dental, Moravní 909, 765 02 Otrokovice, tel.: 577 926 226 - 27, fax: 577 926 205,
e-mail: hufa@hufa.cz, www.hufa.cz