

**Čistič umyvadel na vyplachování úst**

**MD 550** je speciální přípravek, který je určen pro čištění a péči o umyvadla na vyplachování úst, který se může použít přímo bez další úpravy v zubolékařských zařízeních ale i pro čištění umyvadel, WC, obkladaček apod. Přípravek MD 550 odstraňuje zbytky vápna, krve, barvicích tabletek, materiálů pro obtisky atd.

**Složení:** 100 g přípravku MD 550 obsahuje: 40 g ethanolu, < 1% tensidu, < 5% organických kyselin, pomocné látky, voda.

**Spektrum účinnosti:** baktericidní, fungicidní.

**Použití:** Přípravek MD 550 se používá neředěný. Bezpečnostní uzávěr otevřete stiskem hladkých ploch a jeho pootočením. Nalijte několik kapek přípravku MD 550 do umyvadla na vyplachování úst a rozetřete je rovnoměrným tlakem pomocí houby nebo kartáče. Přípravek MD 550 nechte krátce působit a podle potřeby spláchněte vodou. Přípravek MD 550 se však musí bezpodmínečně použít večer **před** provedením desinfekce odsávacího zařízení.

**Upozornění:** Teplota vzplanutí 23°C. Dávejte pozor při zacházení s materiály citlivými na působení alkoholu (např. akrylové sklo). Pro čištění misek na cement nepoužívejte žádné pěnové dezinfikující látky nebo abrazivní čisticí prostředky.

**Ch.-B./použitelné do:** viz potisk.

---

**Hořlavý.** Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné ochranné rukavice.

---

Distributor: DÜRR DENTAL AUSTRIA, Prämonstratenserweg 7, A 6020 Innsbruck, Austria,

☎ +43 512 572834

Kontaktní osoba v ČR: Ing. K. Bažil, Průbežná 74a, 100 00 Praha 10, ☎ 03 67298458