

METAPASTE – hydroxid vápenatý se síranem barnatým

Aplikace:

- exponovaná pulpa v pulp kapničkování a pulpotomii
- protékání kanálků
- apexifikace
- formování bariéry tvrdých tkání
- dočasný výplňový materiál pro infikované kořenové kanálky (léčivo)

Instrukce:

- po přípravě kořenového kanálku jej vyčistěte a vysušte
- nasadte jednorázovou špičku na stříkačku a nasadte dodávaný kroužek pro snadné přesměrování špičky
- zasuňte špičku do kořenového kanálku
- zcela kanálek naplňte stlačením pístu stříkačky, pomalu ji během tohoto kroku vytahujte z kanálku
- přebytečnou hmotu očistěte sterilizovanou peletkou
- odstraňte použitou špičku, nasadte novou a zakryjte

Výhody:

- snadné čištění
- vynikající antibakteriální efekt a radioopáknost
- předmíchaná pasta v konvenční stříkačce
- vynikající přístup do kořenového kanálku a prevence kros-kontaminace

Balení:

- 2.2g pasta ve stříkačce
- jednorázové špičky
- 1x kroužkový rotátor pro kontrolu směru špičky

Upozornění:

- nenaplňujte za apex
- pouze pro dentální použití
- neopoužívejte v případě zvýšené citlivosti na idoform
- zabraňte přímému kontaktu se slunečním zářením
- jestliže je nepoužíváte, mějte stříkačky zavřené
- skladujte v suché a chladné místnosti 10 – 25°C. Nevhodné skladování může způsobit vyschnutí či separaci pasty.

Expirace:

2 roky. Nepoužívejte po vypršení expirace.